Document in	nformation					
ID:	P001 – Appendix D	Rev:	3	Author:		Ingvar Falconer
Product	P001			Product		ImageBank
nr:				name:		
Title:	Installation Manual					
Reviewed	Tomas von Peltzer	Date:	2014-	10-22	Sign:	
by:						
Approved	Mattias Ekberg	Date:	2014-	10-22	Sign:	
by:						

Installationsmanual ImageBank 2



Innehåll

Konventioner i manualen	3
Uppmärksamhetssymboler	3
Miljö och grundkrav	4
ImageBank MS SQL databas	4
Installera ImageBank Klient	4
IBSysAdmin – ImageBank system administration	10

KONVENTIONER I MANUALEN

I manualen betecknar kursiva namn menyer/funktioner som finns i ImageBank. Exempel: *Databas* = meny eller flik i programmet

I manualen betecknar namn med hakar knappar. Exempel: [Ta bild] = Knapp i programmet

Ett val som sker i flera steg betecknas med → Exempel: *Arkiv* → *Ange TWAIN-enhet* Välj menyn Arkiv följt av menyn Ange Twain-enhet

UPPMÄRKSAMHETSSYMBOLER

Följande symboler används av ImageBank.

Information:	0
Varning:	
Programfel:	\bigotimes

MILJÖ OCH GRUNDKRAV

ImageBank är beroende av en SQL server (SQL 2005 eller senare). ImageBank installationspaket leverereras som ett msi-paket.

ImageBank kan installeras från Windows XP SP3 och uppåt. ImageBank 2 är utvecklat i Windows 8 miljö och är därmed kompatibelt med det senaste operativsystemet.

Hårdvarukraven för klienten är följande:

- 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor på 1 gigahertz (1GHz) eller snabbare
- 1 GB RAM-minne (32-bitars) eller 2 GB RAM-minne (64-bitars)
- 10 GB tillgängligt diskutrymme (32-bitars) eller 20 GB (64-bitars)
- Grafikenhet med DirectX 9 och WDDM 1.0-drivrutin eller senare

IMAGEBANK MS SQL DATABAS

ImageBank kräver en access till en instans av en Microsoft SQL databas version 2005 eller senare. Följ instruktioner från Microsoft om hur den installeras. ImageBank har inga specifika krav på databasens konfiguration utöver att den är accessbar på TCP port 1433.

INSTALLERA IMAGEBANK KLIENT

1. Starta installationen genom att dubbelklicka på filen "imagebank.exe". Svara ja på eventuella säkerhetsfrågor som dyker upp.

Insta	allAware Wizard ×
The InstallAv of this setup	vare Wizard is verifying the contents package. This may take a moment.
	Cancel

2. Installationen kontrollerar systemkraven för ImageBank. Om något saknas så installeras detta före själva klient-installationen.



3. När installationen för systemkraven är klar startar ImageBank installationen. Klicka på [Next] för att läsa licensavtalet och bocka för att ni godkänner licensavtalet nere till vänster.

b ImageBank -	InstallAware Wizard – 🗆 🗙
b ImageBank Setup	
Please exit all applications before continuing with the installation. Some component may require that you restart your computer if files being updated are currently in use.	END-USER LICENSE AGREENENT FOR ImageBank IMPORTANT PLEASE READ THE TEXING AND CONDITIONS OF THIS LICENSE AGREENENT CAREFULLY DEPORE CONTINUUNG WITH THIS PROGRAM INITY ALL: Petzer & Etkerg AB end/user Lucense Agreement ("EULA")'s a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Petzer & Ekberg AB. for the Petzer & Ekberg AB societade Software components, media, printer & Ekberg AB societade Software components, media, printer & Reberg AB software product(s) dentified above which may include associetade Software Components, media, printer d'atteins, and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE SOFTWARE PRODUCT, you agrees to be bound by the terms of this EULA. This license agreement represents the entrice Sagreement concerning the program between you and "Petzer & Ekberg AB, (referred to as "Leenser"), and t supersides any prior proposal, ergresentation, or understanding between the parties. If you do not agree to the software Corrections.
To install, you must accept the End User License Agreement.	I have read, understood and agreed to the terms of the End User License Agreement and so signify by clicking 'I accept the terms of the License Agreement' and proceeding to use this product.
InstallAware	< Previous Next > Cancel

4. Du kan anpassa installationen genom att lägga till funktioner. X-Ray demo plugin är en simulator som demonstrerar röntgen-tagning. System Administration Client behöver generellt sätt bara användas på servern.

B I	mageBank - InstallAware Wizard 🗕 🗖 🗙
b ImageBank S	etup
Select features to install:	Feature description:
ImageBark Client ImageBark Client X=1 XRay DemoPlugin System Administration Client System Administration Client	Description for feature New Feature
	Product install path:
	C: VProgram Files (x86)/UmageBank Browse
	Disk space requirements: Available: 101,760 MB Required: 122,332 KB Remaining: 101,640 MB
InstallAware	< Previous Next > Cancel

5. Gå igenom resten av installationsinställningarna och klicka [Next] för att komma vidare.



6. När avslutningsdialogen visas låt "*Run ImageBank now*" vara markerad och klicka [Finish]. Då startas programmet automatiskt.

ImageBank	- InstallAware Wizard 🛛 – 🗆 🗙
ib ImageBank Setup	
ImageBank Setup is complete. You have successfully completed the InstallAware Wizard.	Peltzer _Ekberg AB ImageBank
InstallAware	< Previous Finish Cancel

7. När ImageBank startas så visas först inloggningsdialogen. Första gången programmet körs måste man lägga in inställningarna för databasen innan man kan komma in i programmet. Klicka på [Databas...].

10	ImageBank	(Inloggning	g	x
image	bank	Image	eBank ver 2.2.1	
Använda Lösenor	arnamn d			
Spara inlog	ggningsuppgifter			
Databas	Log	ga in	Avbryt	

8. Ange uppgifterna till databasservern som ska användas för ImageBank (databasen måste installeras separat). Om ni ska använda ImageBank i demosyfte rekommenderar vi att SQL Express installeras på datorn. Klicka på [Testa koppling], "Connection successful" visas om konfigurationen är rätt. Klicka på

[Nästa]

Databasserver 2 Chass database	U anala data han 🛛 2. Installara Karan 🗍 🕹 Chara ana Kadan 🕽
2. Skapa databas /	"Koppia databas 3. Installera licens 4. Skapa anvandare
Välkommon till ImagoPank dat:	abaa konfiguration
	abas-koningulation
Den här guiden hjälper dig att koppla	upp dig mot din databasserver, skapa en databas och installera din licens.
Databas server	
server\imagebank	
Time out Port	
5	
Integrated security	
Användarnamn	
sa	
Lösenord	
••••	
· ·	
Testa koppling	Avbryt Nästa

9. Klicka på "Skapa en ny databas" eller välj "Koppla mot befintlig ImageBank-databas" om det redan är en installerad. Om du väljer en befintlig databas kan du välja stäng direkt då det redan finns en licens installerad annars klickar du på [Nästa] för att gå vidare.

1. Databasserver 2. 9	Skapa databas / koppla databas	3. Installera	licens	4. Skapa användare	
💿 Skapa ny Image	Bank-databas		🔿 Кор	pla mot befintlig Image	Bank-databas
Databasnamn in	nagebank			Visa databaser	
Skap	pa ny ImageBank Databas				
				Testa vald databa	26
					N.T.I.
				Stang	Nasta

10. Klicka på "Installera licens" om du har fått en licensfil. Det går även att skapa en demo licens för en användare om du vill testa produkten. Väljer du demolicens så klickar du på [Close] och logga in med användarnamn "demo" och lösenord: "demo".

1. Databasserver 2. Skapa databas / koppla databas	3. Installera licens	4. Skapa användare	
Installera licens Skapa demolicens]		
			Next

11. Skapa en användare till systemet. Det räcker med att fylla i användarnamn och lösenord i detta läge. Klicka på "Spara användare". Därefter kan du klicka på "Avsluta" för att stänga guiden.

itel	Företag	Mobilnummer
örnamn	Kontor	Fax
Efternamn	Avdelning	E-post
Användarnamn	Phone	Beskrivning
Lösenord	Telefon hem	

12. Fyll i inloggningsuppgifterna för kontot du just skapade och klicka [Logga in]. Om det är första gången ImageBank körs på denna dator kommer en licensfråga att komma upp. Klicka på [Ja] för att aktivera en licens för den datorn.

10	ImageBank Inloggning					
imagek	bank	ImageBank	k ver 2.2.1			
Användari Lösenord	namn					
Spara inloggningsuppgifter						
Databas	Logg	a in	Avbryt			

13. Om du använder ImageBank i demosyfte kan du direkt börja använda programmet. Om du ska lagra bilderna på en server så går du in på "Verktyg \rightarrow Inställningar \rightarrow Inställningar, denna dator...".

Arkiv Redigera Bild Extern bildenhet Verktyg Visa Fönster Hjälp Sok. Ctri+S Bilder Video Filer Bilder Video Filer Inställningar Inställningar, denna användare Inställningar, denna dator
Sok. Ctrl+S Sok Ctrl+S Bider Wdeo Filer Mall hanteraren Installningar Installningar, denna användare Installningar, denna dator
Bilder Video Filer Mall hanteraren Nyckelord Nyckelord Installningar, denna användare Installningar, denna dator Installningar, denna dator
Inställningar Inställningar, denna användare Inställningar, denna dator
Installningar Installningar, denna användare Installningar, denna dator
Installningar, denna dator

10. Välj fliken "*Bilddatabas*" och skriv eller bläddra fram sökvägen till den mapp på servern där alla bilder ska lagras. Viktigt är att alla användare har skriv- och läsrättigheter i denna mapp.



IBSYSADMIN – IMAGEBANK SYSTEM ADMINISTRATION

IBSysAdmin används för att administrera ImageBanks databas. Det finns bl.a. databasverktyg, licenshantering, användarhantering, statistik och logghantering. Se separat manual för mer information.

🛐 IBSysAdmin		x
General Settings Licensing Users & Usergroups Export	Statistics Logs Administrate Patient Data	
Database connection	File paths	
Database connection Server: (local)Vimagebank Pot: Database name: imagebank Time out: 5 Use integrated security: True Usemame: Password: Change connection Database tools Database tools Backup database Attach database Update database Current version: 2.0 Create ImageBank database Convert from ImageBank 12 Bun ImageBank vizard	Path to images Folder Save paths	
		.::

För att skapa fler användare klicka på fliken [Users & Usergroups]. Här kan man lista, skapa, ändra och ta bort användare. För att skapa en ny användare klicka på [Add user] och fyll i formuläret som visas. Klicka sedan på Save för att spara. Den nya användaren visas sedan i listan "ImageBank users".

IBSysAdmin									x
General Settings Licensing Users & Usergroups Export	Statistics	Logs Administr	ate Patient Data						
Account settings	Image	eBank users							
Use ImageBank accounts Use AD	ID	Usemame	Firstname	Lastname	Usergroup				
Save account setting	1	uname	Sven	Svensson	Administrator				
User group types									
Administrator SuperUser									
User Viewer									
					Listures	Adduses		Delete uses	
					List users	Add user	Edit üser	Delete üser	J
	- AD g	oups							
Add Edit Edit rights Delete					List AD	Add AD	Edit AD	Delete AD	
									.::

För mer information och support gå till http://www.imagebank.se