Installationsmanual ImageBank 2



Innehåll

Konventioner i manualen	3
Uppmärksamhetssymboler	3
Miljö och grundkrav	4
Installera ImageBank MS SQL databas	4
ImageBank Databas Configuration Wizard	6
IBSysAdmin – ImageBank system administration	8
Installera ImageBank Klient	9

KONVENTIONER I MANUALEN

I manualen betecknar kursiva namn menyer/funktioner som finns i ImageBank.

Exempel: *Databas* = meny eller flik i programmet

I manualen betecknar namn med hakar knappar. Exempel: [Ta bild] = Knapp i programmet

Ett val som sker i flera steg betecknas med → Exempel: *Arkiv → Ange TWAIN-enhet* Välj menyn Arkiv följt av menyn Ange Twain-enhet

UPPMÄRKSAMHETSSYMBOLER

Följande symboler används av ImageBank.

Information:	0
Varning:	
Programfel:	\bigotimes

MILJÖ OCH GRUNDKRAV

ImageBank är beroende av en SQL server (SQL 2005 eller senare). I serverinstallationen så installeras SQL server 2008 om SQL-server inte finns i din miljö. ImageBank installationspaket leverereras som ett msipaket.

ImageBank kan installeras från Windows 2000 SP3 och uppåt. ImageBank 2.0 är utvecklat i Windows 7 miljö och är därmed kompatibelt med det senaste operativsystemet.

Hårdvarukraven för klienten är följande:

- 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor på 1 gigahertz (1GHz) eller snabbare
- 1 GB RAM-minne (32-bitars) eller 2 GB RAM-minne (64-bitars)
- 10 GB tillgängligt diskutrymme (32-bitars) eller 20 GB (64-bitars)
- Grafikenhet med DirectX 9 och WDDM 1.0-drivrutin eller senare

INSTALLERA IMAGEBANK MS SQL DATABAS

1. Starta installationen via installationsdialogen. Om ingen dialog visas automatiskt startar du installationen genom filen "imagebank server sql2008 (x86).exe".

Svara ja på eventuella säkerhetsfrågor som dyker upp (Vista och Windows 7).





2. Installationen kontrollerar systemkraven för ImageBank server (SQL 2008 och .NET 3.0). Beroende på vad som behöver installeras kan detta ta stund och kräva eventuella omstarter. Klicka på [Next] och fortsätt installationen.

📴 ImageBank Server - InstallAware Wizard	
Application Requirements	
The following requirements must be processed before starting s	ietup.
Microsoft SQL Server Express 2008	
To continue, dick Next.	
Installaware	Next > Cancel



3. När installationen för systemkraven är klar startar ImageBank Server installationen. Klicka på [Next] för att läsa licensavtalet och bocka för att ni godkänner licensavtalet nere till vänster. Klicka sedan på [Next] till dess installationen är klar.

📴 ImageBank Server - InstallA	ware Wizard	• 83	📴 ImageBank S	Server - InstallAware Wizard	- 0 %
imagebank	Welcome to the InstallAware Wizard for ImageBank Server	r i	License Agi Please care	reement refully read the following license agreement.	di
	The InstallAware Wizard will install ImageBank Server computer.	on your	END-USER LIC TERMS AND C CONTINUING License Agree individual or a AB software p	CENSE AGREEMENT FOR ImageBank IMPORTANT PLEASE R CONDITIONS OF THIS LICENSE AGREEMENT CAREFULLY BE WITH THIS PROGRAM INSTALL: MedSpace Systems AB En ement ("EULA") is a legal agreement between you (either a single entity) and MedSpace Systems AB. for the MedSpac product(s) identified above which may include associated so	EAD THE FORE d-User an e Systems ftware
	WARNING: This program is protected by copyright law international treaties.	v and	components, ("SOFTWARE P license agreen between you supersedes an parties. If you	media, printed materials, and "online" or electronic docume PRODUCT). By installing, copying, or otherwise using the RODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA ment represents the entire agreement concerning the prog and MedSpace Systems AB, (referred to as "licenser"), and ny prior proposal, representation, or understanding between u do not agree to the terms of this EULA, do not install or u monuter.	A. This gram I it n the use the
	To continue, click Next.		I accept the	terms of the license agreement	
	< Back Next >	Cancel	InstallAware —	< Back Next >	Cancel
目 ImageBank Server - InstallA	ware Wizard	• 33	🗐 ImageBank S	Server - InstallAware Wizard	- 8 %
imagebank	Completing the InstallAware Wizard for ImageBank Server		Installing In The progra	imageBank Server am features you selected are being configured.	di
	The InstallAware Wizard is now ready to configure Im Server on this computer.	ageBank	17	Please wait while the InstallAware Wizard installs ImageBank Serve This may take several minutes.	er.
	- Click Next to begin configuration			{B466B054-B948-4B69-9F79-864D96296735}	
	- Click Back to change settings				
	- Click Cancel to exit		InstallAware		
	< Back Next >	Cancel		< <u>B</u> ack	

4. Låt "*Run ImageBank Server now*" vara markerat för att starta IBSysAdmin verktyget och klicka på [Finish]. Då kommer ImageBank Database Configuration Wizard starta för att skapa databas, installera licensen och skapa ett administratörskonto.

ImageBank Server - InstallA	ware Wizard
imagebank	Completing the InstallAware Wizard for ImageBank Server
	You have successfully completed the InstallAware Wizard for ImageBank Server.
	V Bun ImageBank Server now
	To close this wizard, click Finish.
	< Back Finish Cancel

IMAGEBANK DATABAS CONFIGURATION WIZARD

Efter installationen så startar ImageBank Database Configuration Wizard automatiskt om kryssrutan i sista dialogfönstret för installationen var förbockad. Om den inte startar automatiskt så kan du starta den direkt via startmenyn "ImageBank Server" - "ImageBank Server Administration".

1. Klicka på [Test connection] för att kontrollera kopplingen mot servern. Om detta inte fungerar, ange korrekta inloggningsuppgifter för SQL databasen. Klicka [Next] när meddelandet "Connection Successful" visas.

💽 ImageBank Database Configuration Wizard 📃	ImageBank Database Configuration Wizard
1. Connect to server 2. Connect / Create database 3. Install license 4. Create user	1. Connect to server 2. Connect / Create database 3. Install license 4. Create user
Welcome to the ImageBank database configuration wizard	Welcome to the ImageBank database configuration wizard
This wizard will help you connect to youre database server, connect to or create the ImageBank database and set up your license.	This wizard will help you connect to youre database server, connect to or create the ImageBank data and set up your license.
Enter database server name	Erter database server name
DA I OHNAMN'magebank Time out Port 5 Test connection	DATORNAMIVmagebark Time out Poit 5 Test connection
Use integrated security	Use integrated security Connection Successful
Usemame	Usemame
Password	Password
Skip wizard Next	Skip wizard

2. Skriv in namnet för den nya ImageBank databasen (förslagsvis "imagebank") och klicka sedan på [Create new ImageBank database]. Klicka [Next] när detta är klart.

S ImageBank Database Configuration Wizard	S ImageBank Database Configuration Wizard
1. Connect to server 2. Connect / Create database 3. Install license 4. Create user	1. Connect to server 2. Connect / Create database 3. Install license 4. Create user
Create a new ImageBank database with default settings. O Connect to a existing ImageBank database	Oreate a new ImageBank database with default settings.
Database name List databases	Database name List databases
Create new ImageBank database	Create new ImageBank database
	Getting location from master Database created successfully! Database set to AUTO_SHRINKI Ruming Sort Sort ran ok.
Test selected database	Test selected database
Net	Net

3. Klicka på [Install license file]. Leta upp och öppna er licensfil. Därefter visas den installerade licensinformationen i statusfönstret, kontrollera att era uppgifter är korrekta. Klicka [Next].





Test connection Connection Successful

Next

4. Fyll i formuläret för att skapa ett administratörskonto. Klicka på [Save user] för att spara. Klicka sedan på [Finish and close] eller [Finish and run IBSysAdmin] för att avsluta guiden och starta IBSysAdmin som är ImageBanks administrativa systemverktyg. Med det kan man bl.a. skapa fler användare, ange sökväg till bildmappen, visa statistik och loggar, hantera licenser, exportera patienter, ta backup på databasen osv.

nnect to server	2. Connect / Create database 3. Install lice	inse 4. Create user
Create an accour	nt for ImageBank with administrator rights.	
Title	Company	Mobile
First Name	Office	Fav
Last Name	Department	Email
Usemame	Phone	Description
		*
Password	Home Phone	~
Save u	iser	

onnect to server 2. Con	nect / Create database 3. Install li	cense 4. Create user
Create an account for In	nageBank with administrator rights.	
Title	Company	Mobile
	Tandläkama AB	
First Name	Office	Fax
Sven		
Last Name	Department	Email
Svensson		sven@xxxxxxxxxx
Usemame	Phone	Description
uname	08-XXX XX XX	
Password	Home Phone	
pword		
Save user		

IBSYSADMIN – IMAGEBANK SYSTEM ADMINISTRATION

IBSysAdmin används för att administrera ImageBanks databas. Det finns bl.a. databasverktyg, licenshantering, användarhantering, statistik och logghantering. Se separat manual för mer information.

IBSysAdmin	
General Settings Licensing Users & Usergroups Export	Statistics Logs Administrate Patient Data
Database connection	File paths
Database connection Server: (local)Vimagebank Port: Database name: imagebank Time out: 5 Use integrated security: True Usemame: Password: Change connection Database tools Database tools Backup database Update database Update database Current version: 2.0 Create ImageBank database Convert from ImageBank 12 Run ImageBank wizard	Plie paths Path to images Folder Save paths
L	

För att skapa fler användare klicka på fliken [Users & Usergroups]. Här kan man lista, skapa, ändra och ta bort användare. För att skapa en ny användare klicka på [Add user] och fyll i formuläret som visas. Klicka sedan på Save för att spara. Den nya användaren visas sedan i listan "ImageBank users".

lotal octaining a boomaining a	Statistics 1	.ogs Administr	rate Patient Data				
Account settings	Image	Bank users					
Use ImageBank accounts Use AD	ID	Usemame	Firstname	Lastname	Usergroup		
Save account setting	1	uname	Sven	Svensson	Administrator		
Care accounty							
ser group types							
udministrator							
Jser							
fiewer							
	1.0			1	Listusers	Add user Edit user	Delete user
							Delete dael
	- AD gro	oups					

INSTALLERA IMAGEBANK KLIENT

1. Starta installationen via installationsdialogen. Om ingen dialog visas automatiskt startar du installationen genom filen "imagebank.exe". Svara ja på eventuella säkerhetsfrågor som dyker upp (Vista och Windows 7).



2. Installationen kontrollerar systemkraven för ImageBank. Tidigare versioner av ImageBank måste avinstalleras och .NET 3.0 är ett krav.



3. När installationen för systemkraven är klar startar ImageBank installationen. Klicka på [Next] för att läsa licensavtalet och bocka för att ni godkänner licensavtalet nere till vänster.



4. Välj "Standard" eller "Custom" om du vill anpassa installationen.



5. Gå igenom resten av installationsinställningarna och klicka [Next] för att komma vidare.



6. När avslutningsdialogen visas låt "*Run ImageBank now*" vara markerad och klicka [Finish]. Då startas programmet automatiskt.

🐻 ImageBank - InstallAware W	/izard 🗖 🗉 🕴
imagebank	Completing the InstallAware Wizard for ImageBank
	You have successfully completed the InstallAware Wizard for ImageBank.
	To close this wizard, click Finish.
	< Back Finish Cancel

7. När ImageBank startas så visas först inloggningsdialogen. Första gången programmet körs måste man lägga in inställningarna för databasen innan man kan komma in i programmet. Klicka på [Databas...] och fyll i korrekta anslutningsuppgifter för databasen. Klicka sedan [Anslut] för att spara och återgå till inloggningen.

🐻 ImageBank Inloggning] [🐻 ImageBank datab	asinställningar	×
imagebank	ImageBank ver 2.0.0.0		Databas anslutning	Server\imagebank	
Användarnamn Lösenord Domän			Autentisering: Användamamn: Lösenord:	sa	
Databas Logga	a in Avbryt			Anslut Avbry	t

8. Fyll i inloggningsuppgifterna för ett ImageBank konto och klicka [Logga in]. Om det är första gången ImageBank körs på denna dator kommer en licensfråga att komma upp. Klicka på [Ja] för att aktivera en licens för den datorn.

🐻 ImageBank Inlog	ggning	— ×
imageb	ank	ImageBank ver 2.0.0.0
Användarnam Lösenord Domän	nn nisse	
Databas		.ogga in Avbryt

ImageBank startar och det finns en inställning att göra innan programmet kan börja användas.
 Gå in på "Verktyg →Inställningar →Inställningar, denna dator...".

🐻 ImageBank 2.0	
Arkiv Redigera Bild Extern bildenhet Verktyg Visa Fonster	Hjalp
(Sök patient) Sök Cul+S	
Cilder Video Filer	
Installoingar	letillenen dem mördre
	Installin ngar, cenna dator

10. Välj fliken "*Bilddatabas*" och skriv eller bläddra fram sökvägen till den mapp på servern där alla bilder ska lagras. Viktigt är att alla användare har skriv- och läsrättigheter i denna mapp.

Inställningar, denna	arbetsstatior	ı						_ ×
Importinställningar	Bilddatabas	Kamera	Video	Audio	Extern prog	gramvara	X-Ray	Plugins
Bilddata								
Mapp för att lag	a bilder, filer,	video och	n ljud.					
Sökväg:	\\Server\Im	ageBankB	lilder					
				_				
					ок	Avbryt		Verkställ

För mer information och support gå till <u>http://www.imagebank.se</u>