

Document information					
ID:	P001 – Appendix B	Rev:	4	Author:	Tomas von Peltzer
Product nr:	P001		Product name:	ImageBank	
Title:	ImageBank User Manual				
Reviewed by:	Ingvar Falconer	Date:	2014-05-21	Sign:	
Approved by:	Mattias Ekberg	Date:	2014-05-21	Sign:	

Användarmanual

ImageBank 2



INNEHÅLL

1. Välkommen till ImageBank	4
2. Avsedd användning	7
3. Försiktighetsåtgärder	7
4. Konventioner i manualen	8
5. Uppmärksamhetssymboler	8
6. Importera bilder	9
Tips för import av bilder	9
"Importera från disk" (import via utforskaren)	10
"Importera allt" (t ex via en kortläsare)	16
Automatisk import ("Bevaka mapp")	17
7. Betrakta och visa bilder	20
"Visa alla bilder på en patient" och flytta bilder mellan patienter	23
8. Exportera bilder	25
9. Redigera bilder	30
Redigeringsverktyg	33
10. Skriva ut bilder	37
11. Egenskaper hos bilder	38
Område	41
Nyckelord	42
Nyckelordshanteraren	42
Anteckningar	44
Kvalitet	45
12. Sökfunktion	45
13. Visa bilder ovanpå andra program	48
Bildfönster	50

14. Utökad urval	51
15. Mall hanteraren	51
16. Inställningar	56
Inställningar, denna dator	56
Importinställningar	56
Bild databas	57
Kamera	58
Video	58
Externa program	59
17. Vanliga kortkommandon	60
I Bildspel (Slide Show):	60
18. Översikt menyer	61
Arkiv	61
Redigera	62
Bild	62
Extern bildenhet	63
Verktyg	63
Visa	64
Fönster	65
Hjälp	65
19. Verktygsrad	66
20. Flikar	68
21. Hjälp menyer/genvägar	69

VÄLKOMMEN TILL IMAGEBANK

Denna manual finns även i ImageBank (under "Hjälp") där finns också filmer för att informera och utbilda mer ingående om programmet. Om man trycker på "Hjälp" så länkas man till korrekt version av manualen som finns publicerad på www.imagebank.se

Önskas manualen i pappersformat, kontakta Peltzer & Ekberg AB för att få dessa skickade kostnadsfritt. Normalt skickas detta inom 7 dagar.

Manualen finns också att ladda ner på www.imagebank.se

Det rekommenderas att användaren alltid har en nerladdad version av manualerna lokalt på sin dator eller en utskriven version.

ImageBank är ett program som lagrar och hanterar digital information (bilder, röntgen, video, ljud, text, statistik mm) specialiserat för vården. Programmet är utvecklat av Peltzer & Ekberg AB i Sverige. Programmet finns på svenska och hanterar svenska tecken.

ImageBank 1.0 lanserades 2005 då kravet från tandvården ökade för säker och effektiv hantering av digital röntgen och fotografier.

Med ImageBank kan man importera, redigera, visa och söka bilder snabbare än något annat program på marknaden. ImageBank visar bilder på ett mycket informativt sätt både mot vårdutövare och mot patienten. Man kan koppla journalprogram mot ImageBank, programmet kan hämta och lämna information. Det går att koppla videokällor och ljud till programmet. Data går att redigera, komprimera, exportera, indexera, skriva ut och lagra. Det finns en ärendehantering som loggar allt som sker i systemet, ImageBank följer patientdatalagens riktlinjer och krav.

Imagebank fungerar både med få samtidiga användare såväl som med tusentals. Programmet har kopplingar för krypterad överföring till ett webbaserat e-post system MedSpace (utvecklat som en extramodul). MedSpace går att använda mot alla mottagare med en e-post adress.

ImageBank är speciellt bra på:

- **Importera**
Med få klick importerar man digitala bilder direkt från kortläsare eller kamera med sladd in på aktiv patient från kompatibelt journalsystem. Man använder färdiga bildkartor eller skapar sina egna. Bildkartor kan anpassas vid rutinmässig dokumentation t ex genom att rotera och komprimera bilder automatiskt vid import. Stora möjligheter för att anpassa ImageBank till verksamhetens specifika önskemål.

Mer om import av bilder i den kliniska miljön på sid 9.

- **Redigera**

När man önskar rotera, beskära och spegla bilder sker detta mycket enkelt direkt på bildkartan eller, vid mer avancerad redigering såsom annotering, mäta längd, vinklar och area, i ImageBanks redigeringsläge.

Mer om att redigera bilder på sid 30.

- **Söka bilder**

Varje bild i ImageBank kan göras sökbar (indexerad). Det går således att söka över samtliga bilder, och över alla patienter.

Sökning i ImageBank kan göras på anatomisk region, nyckelord, datum och/eller fritext. Möjligheterna för att snabbt kunna sammanställa, visa och exportera bilder är mycket stor.

Med ett fåtal klick når man alla bilder och man kan bestämma sökkriterier - oändligt och individualiserat!

Mer om sökfunktionen på sid 45.

- **Visa patienten**

Med hjälp av ImageBanks bildvisning kan man själv betrakta och visa patienten de bilder man önskar. Patienten slipper se överflödigt information. I bildspelet kan man enkelt zooma och panorera i respektive bild. Bildspelet är mycket användbart vid till exempel utbildning men också vid statusgenomgång för att patienten snabbare ska "äga sin sjukdom" och lättare medverka vid val och förståelse av behandling.

Mer om visning av bilder på sid 19.

- **Integrering**

ImageBank använder SQL-databas och programmeras i C# .NET. En koppling mot ett journalsystem innebär att en aktiv patient i journalen också är aktiv i ImageBank.

- **Utskrifter**

Det finns flera alternativa utskrifter. Det finns funktion för att skriva ut bara valda bilder eller för att skriva ut ett helt status. Bilder kan "stämplas" med önskvärd, patient och vårdgivarinformation samt datum. ImageBank hanterar utskrifter enligt Personuppgiftslagen (PUL).

Mer om utskrifter på sid 37.

- **Exportera**

Alla bilder som redigeras i ImageBank kan exporteras som original eller i dess redigerade form. Exempel på befintliga exportfunktioner mot andra system är C-takt (www.ctakt.com) och MedSpace (www.medspace.se) vilket båda är helt eller delvis webbaserade och krypterade e-postklienter med användarkataloger.

Det går också att exportera till annan enhet t ex hårddisk, Cd/DVD-brännare mm.

Mer om export av bilder på sid 25.

ImageBank kan även rensas och tömmas på innehåll för lagring i annat system.

AVSEDD ANVÄNDNING

Den avsedda användningen av ImageBank är att importera, redigera, visa, söka och hantera dentala bilder för att underlätta en diagnos. Tänkt användare är främst tandläkare och tandsköterskor. Produkten kan även användas som ett verktyg för att underlätta information till tandvårdspatienter. Produkten är avsedd att användas i en klinisk miljö.

Utöver detta gäller följande för Imagebank:

- Enheten är programvara som används för att lagra och visa dentala bilder avsedda för diagnoser. Enheten är programvara och består av klientprogram för stationära datorer samt en databasserver. Bilder kan hämtas från olika källor, inklusive röntgensensorer och kameror.
- Enheten styr inte bildtagningen i sig.
- Enheten innehåller grundläggande algoritmer för bildmanipulering, såsom färginvertering, bitdjupskonvertering, kontrast, gamma, justering av ljusstyrka, skärpa och histogram.
- Patienten är en person i behov av tandvård.
- Användaren måste ha grundläggande färdigheter inom användande av PC-datorer.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Det är mycket viktigt att ImageBank används i det avseende som beskrivits ovan. Utöver detta är det viktigt att följande försiktighetsåtgärder följs:

- Om användaren byter sensor är det mycket viktigt att en korrekt omkalibrering görs och korrekta kalibreringsvärden fylls i. Konsekvenserna av en felaktig kalibrering kan vara att en felaktig diagnos ställs vilket kan leda till en felaktig behandling.
- Om användaren använder automatiskt bildmanipulering såsom spegelvändning av bilder, är det viktigt att användaren är försiktig när bilder importeras för att säkerställa att bilder hamnar på rätt plats i bildplatshållaren. Konsekvenserna av att om felaktig import görs kan vara att en felaktig diagnos ställs vilket kan leda till en felaktig behandling.
- Det är viktigt att vara noggrann med att bilder importeras på rätt patient. Personnumret finns tydligt markerat i ImageBank. Om patienten har bytt personnummer kan detta ändras (se avsnitt 17). Konsekvenserna av att spara information på fel patient kan vara att en diagnos ställs på fel patient vilket kan leda till en felaktig behandling.
- Läs informationen som visas i dialogerna i programmet. Alla permanenta förändringar bekräftas via dialoger innan de utförs.

KONVENTIONER I MANUALEN

I manualen betecknar kursiva namn menyer/funktioner som finns i ImageBank.

Exempel: *Databas* = meny eller flik i programmet

I manualen betecknar namn med hakar knappar.

Exempel: [Ta bild] = Knapp i programmet


Ett val som sker i flera steg betecknas med →


Exempel: *Arkiv* → *Ange TWAIN-enhet*


Välj menyn Arkiv följt av menyn Ange Twain-enhet

UPPMÄRKSAMHETSSYMBOLER

Följande symboler används av ImageBank.

Information: 

Varning: 

Programfel: 

IMPORTERA BILDER

TIPS FÖR IMPORT AV BILDER

Det finns tre olika sätt att importera bilder till ImageBank. Beroende på kliniska rutiner väljer man det sätt som passar bäst.



- "Importera från disk"- betyder att man vid varje importtillfälle väljer en eller flera bilder, som ska importeras. ImageBank frågar vilken bildkarta man vill lägga bilderna på.
- "Importera allt" - betyder att man via "Verktyg → Inställningar..." väljer en fast enhet (t ex en kortläsare eller en kamera) som importen sker ifrån ([Importera allt] rekommenderas som rutin). Det innebär att man bara klickar på en ikon för att importera in bilderna. ImageBank frågar vilken bildkarta man vill lägga bilderna på. ImageBank tömmer kortet sedan automatisk om man så önskar.
- "Bevaka mapp" (automatisk import) ger möjligheten att koppla kameran med en sladd mot datorn och att bilderna importeras in i ImageBank allt eftersom de exponeras i kameran.

ImageBank kopierar bilderna eller om man vill flyttar bilderna från importkällan. Att flytta bilderna rekommenderas vanligtvis vilket t ex innebär att man har ett minneskort som är tömt på bilder inför nästa fotografering.

Om man har en rutin för att fotografera t ex nya patienter/fall är det en fördel om man väljer någon av de befintliga bildkartorna eller skapar egna bildkartor (skapa bildkartor utförs i "Verktyg → Mall hanteraren..." mer om mallar på sid 51.).

Låt oss se på ett vanligt kliniskt exempel från en vårdenhet som sysslar med vuxentandvård:

På mottagning har de som rutin att ta 5 stycken bilder på varje ny patient. Fotograferingen delegeras vanligtvis till tandsköterskor och det tar i genomsnitt 1½ minut för dem att ta bilderna och lägga in dem i ImageBank. Bilderna är som följer:





Rutinen innebär att de vet att de två sista bilderna (nummer 5 och 6, överkäke respektive underkäke) alltid är tagna med spegel vilket medför att de ska roteras för att få en korrekt visning av patientens status. I fallet ovan ser man att de två sista bilderna är felvända pga spegeln som krävs när man tar över- och underkåkens tugg vy. För att få en korrekt visning kan man i ImageBank använda sig av en bildkarta som automatiskt spegelvänder bilderna på dessa två bilder (d v s de som är tagna med hjälp av en spegel).

Om man tar bilder mer sporadiskt t ex av en slemhinneförändring eller en skada då är man inte betjänta av en automatisk bildrotering. Om man trots det behöver rotera eller spegelvända en bild är det mycket enkelt att göra när bilden är importerad till ImageBank.

Mer om redigering av bilder på sid 30.

Rekommendation är att man så långt det är möjligt använder sig av [Importera allt] funktionen. I andra fall då man kanske vill importera bilder via annan källa (t ex en CD eller annan mapp) är vanligtvis [Importera från disk] att föredra. Om man har bilder från flera olika patienter på sitt kamerakort (eller i kameran) är också [Importera från disk] att rekommendera. Då kan man enklare välja ut rätt bilder till rätt patient.

“IMPORTERA FRÅN DISK” (IMPORT VIA UTFORSKAREN)

När man vill importera bilder och vill välja ut vilka filer (bilder) man vill importera så använd [Importera från disk]. [Importera från disk] hämtar bilderna via Windows utforskarfönster, därifrån når man datorns alla mappar, kortläsare, kamera och eventuellt nätverk (dvs den hårdvara och system mottagningen är ansluten till).


För att importera bilder med [Importera från disk] gör man så här:

1. Klicka på "Arkiv → Importera bilder → Importera från disk". Alternativt klicka på ikonen [Importera från disk] eller välj kortkommandot Ctrl+I. Det går även att dubbelklicka med vänster musknapp på en tom bildruta.
2. Finn var bilderna ligger i Windows utforskarfönster som kommer upp automatiskt. Markera de bilder man önskar importera (det går att importera flera på en gång. Håll ned knappen Ctrl på tangentbordet och klicka på bilderna som ska importeras).

3. Välj om bilderna ska Kopieras eller om de ska Flyttas (extraheras) från källan när ImageBank ställer frågan.
4. Välj bildkarta (Mall) som de importerade bilderna ska ligga på när ImageBank frågar. Byt datum om annat än dagens önskas.

Se exempel nedan:


Import via utforskaren "**Importera via disk**" liknar mer det traditionella sättet att importera bilder eller filer till ett program.

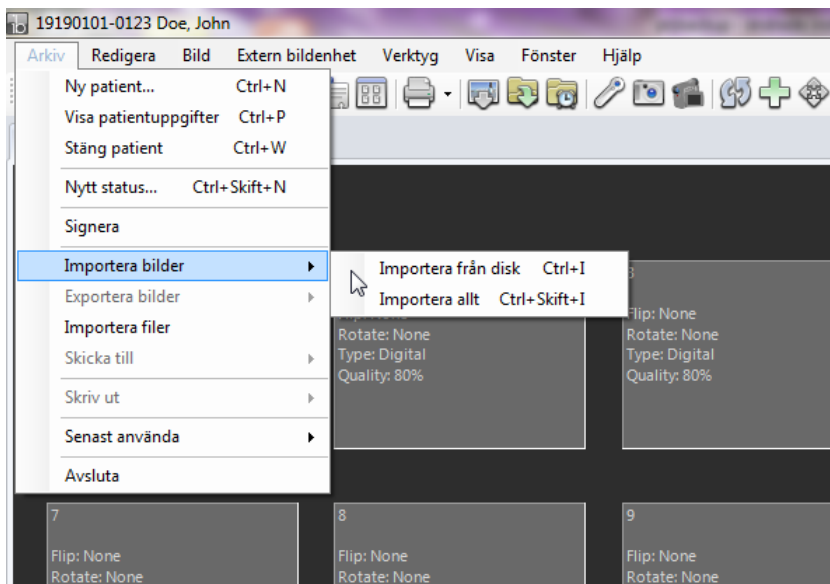


Via "Arkiv" väljer man "**Importera bilder** → **Importera via disk**" vilket medför att ImageBank öppnar utforskaren där man själv kan finna och välja ut de önskade bilderna. Det kan t ex vara från ett minneskort eller från en mapp i datorn.




Det finns även en ikon för [Importera via disk] för samma kommando vilket gör importen snabbare. Kortkommandot är Ctrl+I.

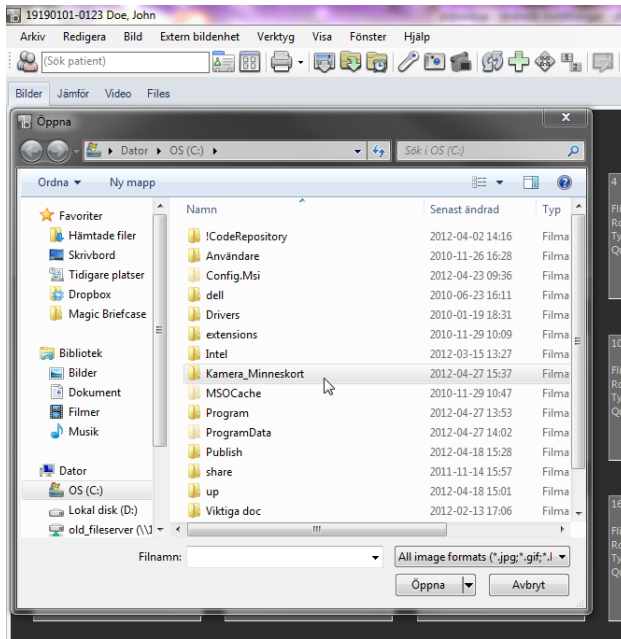


Nu kommer man in i Windows utforskar fönster. Här navigerar man själv till det ställe man vet att bilderna finns. Det kan vara en mapp, en kortläsare eller en kamera som är kopplad via kabel till datorn. I detta exempel finns bilderna i mappen "kamera_minneskort". Man dubbelklickar eller väljer [Öppna] och ser vad som finns i mappen

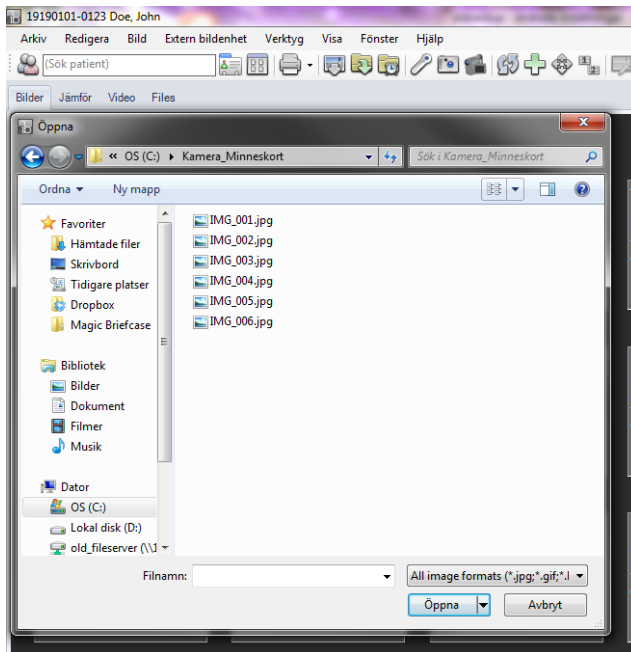


I mappen finner man i detta exempel 6 stycken bilder. Genom att markera bilderna och sedan välja [Öppna] så importerar bilderna till ImageBank. Om man däremot vill se bilderna före import gör så här:

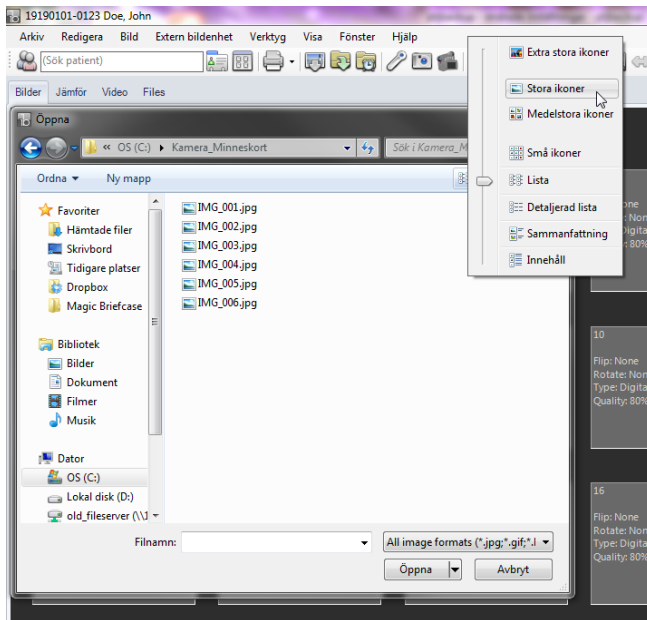


Klicka på Visa-menyn och välj [Stora ikoner] så ser man bilderna och kan enklare välja ut rätt bild/bilder. Det kan t ex vara så att man har tagit bilder på flera olika patienter på samma minneskort och sedan vill separera dem, då är [Importera via disk] att föredra.

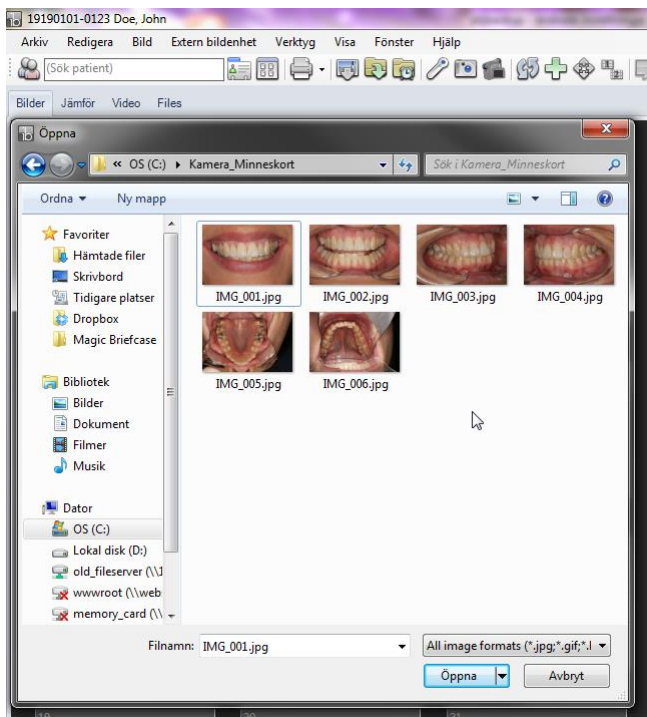

I detta fall vill man importera samtliga bilder. Det görs enkelt genom kortkommandot Ctrl+A. Man kan också markera de bilder man önskar importera samtidigt som man håller ner Ctrl-knappen på tangentbordet. När markeringen är klar klickar man [Öppna] så importeras bilderna in i ImageBank.

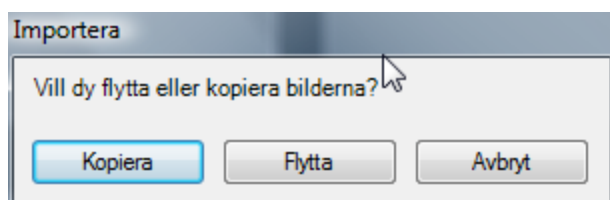

ImageBank frågar om man vill kopiera eller flytta/extrahera bilderna. Om man väljer [Kopiera] finns bilderna kvar där man hämtade dem. Om man väljer [Flytta] extraheras bilderna och finns då inte kvar där man hämtade dem. Om man t ex hämtar bilder från ett minneskort som sedan ska sättas in i en kamera är oftast [Flytta] att rekommendera. Då töms kortet och klart att börja användas igen. Det samma kan gälla om man tidigare har sparat bilder i mappar som man kanske inte behöver ha kvar nu när de är [sparade] i ImageBank.

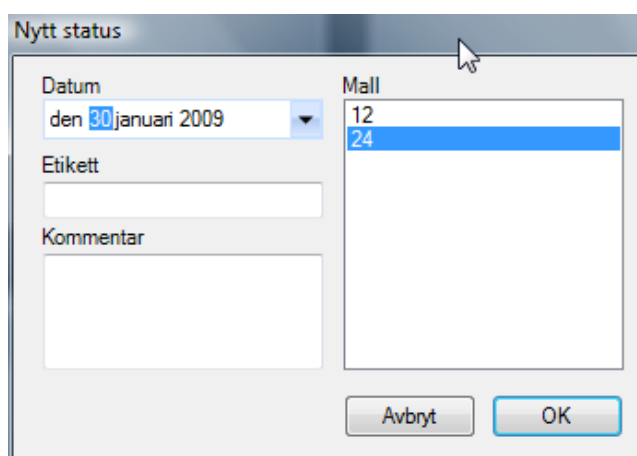


ImageBank låter nu användare välja vilken typ av bildkarta man vill att bilderna ska visas på. Man kan bygga sina egna bildkartor och det finns även några färdiga med i programmet. I detta fall väljer man "24" vilket står för antalet möjliga bilder på kartan. Om man vill ändra datum på kartan kan man göra det vid "Datum"(bilderna som importeras kanske är tagna vid ett tidigare tillfälle?). Det går att "bygga egna bildkartor" ("*Verktyg*→ *Mall hanteraren...*", sid 51) om man så önskar. Bildkartan med 12 eller 24 bilder rekommenderas som standard.

Om man skriver en kommentar till bildkartan hamnar den här.

2009-01-30

"Etikett" ger användaren möjlighet att istället för datum lägga till en rubrik till bildkartans flik som visas nere i programmets vänstra hörn. Om inte etikett fylls i lägger ImageBank till valt datum automatiskt. En patient kan ha många bildkartor som då visas på denna rad.

"Kommentar" (kan också användas för översiktens skull och för att namnge eller informera kort om respektive bildkarta (se bild ovan, gul text).

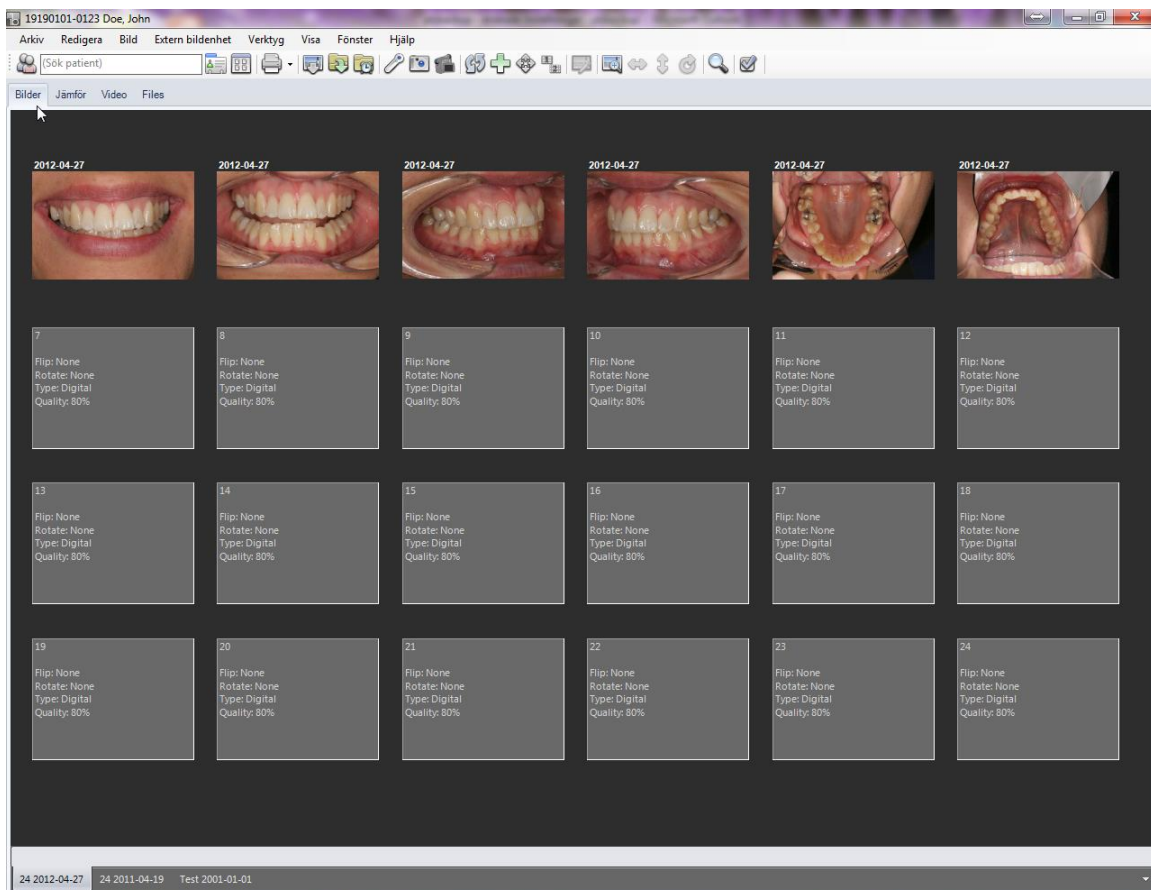

De bilder man importerade är nu placerade på aktiv patient (Marcus Andersson, namn/personnummer kommer normalt från journalsystemet). Nere till vänster ser man det datum bildkartan har (2009 -01-30). Ett problem vid nuvarande status är att över- och underkäksbilden (bild 5 och 6) är tagna i spegel, dessa två bilder behöver således spegelvändas för en korrekt visning. Det finns flera olika snabba sätt att göra detta i ImageBank.

Mer information om redigering av bilder på sid 30.

”IMPORTERA ALLT” (T EX VIA EN KORTLÄSARE)


När man vill importera bilder på snabbaste sätt väljer man {Importera allt}. {Importera allt} hämtar bilderna via en förinställd sökväg t ex en kortläsare eller en kamera med sladd.

För att ställa in vart Imagebank ska hämta bilderna ifrån går du in på ”*Verktyg → Inställningar → Inställningar denna dator*”(Se sid 52 ”Inställningar”)


För att importera bilder automatiskt med ”Importera allt” gör man så här:

1. Klicka på ”*Arkiv → Importera bilder → Importera allt*”. Alternativt klicka på ikonen [Importera allt] eller välj kortkommandot Ctrl+Skift+I.(För att välja Sökväg till Importera allt se sid 56 Importinställningar)
2. Välj bildkarta (Mall) som de importerade bilderna ska ligga på. Byt datum om annat en dagens önskas. Lägg till etikett och/eller kommentar om så önskas.


Se exempel nedan:

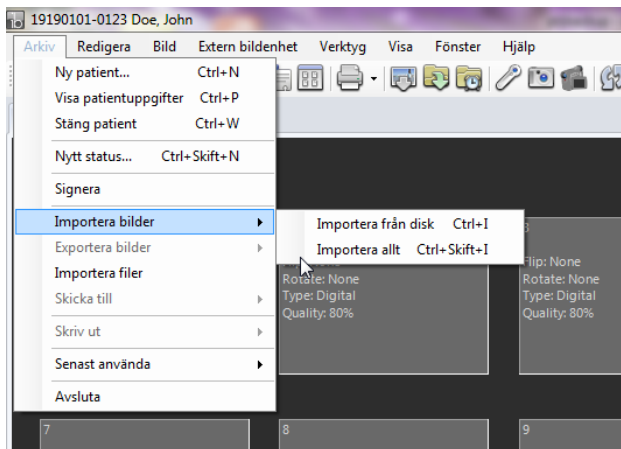


Via ”*Arkiv*” väljer man ”*Importera bilder/Importera allt*” vilket medför att ImageBank går till den sökväg/fil man tidigare definierat i ”*Verktyg → Inställningar*”. Då hämtas samtliga bilder in till ImageBank, det kan t ex vara från ett minneskort eller direkt från kameran via en kabel.

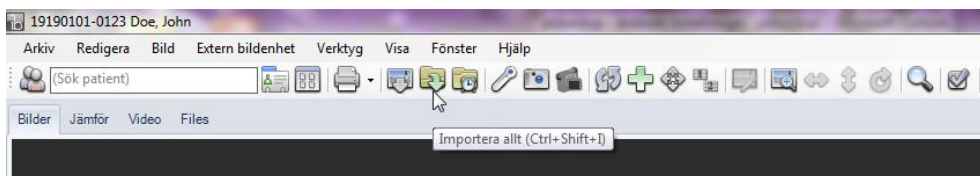

Det finns även en ikon för [Importera allt] som ett ännu snabbare alternativ. Kortkommandot är Ctrl+Skift+I.

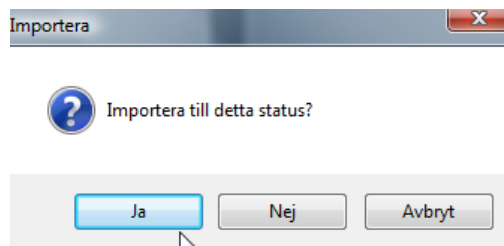

ImageBank låter nu användaren välja vilken typ av bildkarta man vill att bilderna ska ligga på. Om man svarar [Ja] läggs bilderna till den aktiva bildkartan (status).

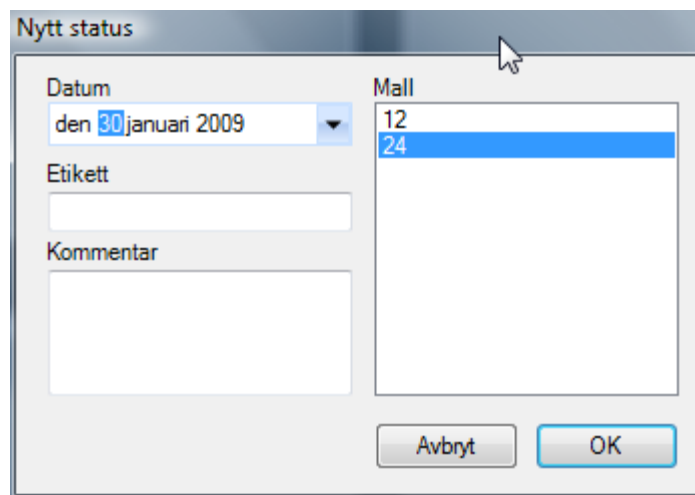

Väljer man [Nej] kan man byta bildkarta. Man kan bygga sina egna bildkartor och det finns även några färdiga med i programmet. I detta fall väljer man "24" vilket står för antalet möjliga bilder på kartan. Om man vill ändra datum på kartan kan man göra det vid "Datum" (bilderna som importeras kanske är tagna vid ett tidigare tillfälle). Det går att "bygga egna bildkartor" ("*Verktyg*→ *Mall hanteraren...*"), om man så önskar. Bildkartan med 12 eller 24 bilder rekommenderas som standard.

AUTOMATISK IMPORT ("*BEVAKA MAPP*")

Om man vill koppla en kamera direkt till datorn via en kabel (t ex USB eller firewire) kan man använda "*Bevaka mapp*". ImageBank importerar automatiskt från mappen när bilder finns där. Bilderna flyttas från mappen vilket innebär att den alltid förblir tom.


För att importera bilder automatiskt med "*Bevaka mapp*" gör man så här:

1. Klicka på ikonen [*Bevaka mapp*] i menylisten.(För att ställa in vart ifrån bilderna hämtas se sid 56 *Import inställningar*)
2. Om man har en bildkarta öppnad sedan tidigare kommer ImageBank att lägga in bilderna på första lediga platshållare. Om man inte har någon bildkarta på

aktiv patient frågar ImageBank om man vill öppna en ny bildkarta. Frågan kommer först när det finns någon bild i mappen.

3. Välj bildkarta (Status) som de importerade bilderna ska ligga på. Byt datum om annat en dagens önskas. Mer information om "Nytt status på sid 14.
4. När man är klar med bildtagningen måste man klicka på [Bevaka mapp]-ikonen för att stänga av att ImageBank bevakar sökvägen.

Se exempel nedan:

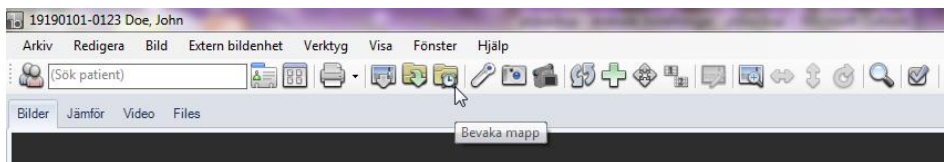

Klicka ikonen "Bevaka mapp" eller...




välj "Bevaka mapp" via menyn "Extern bildenhet" (kortkommande Ctrl+Skift+A).

Bevaka mappen definieras i "Verktyg → Inställningar..." (se sid 56). Samtliga bilder i mappen hämtas löpande in till ImageBank. Till skillnad från de övriga importalternativen fungerar "Bevaka mapp" som en vaktande import dvs den är aktiverad tills man stänger av den. Ett exempel kan vara att man har en kamera kopplad med kabel till datorn och varje gång man tar en bild importeras (extraheras) bilden momentant till ImageBank.


Vår erfarenhet är dock att det är bättre att ta bilderna utan en direkt koppling (kabel) mellan kamera och dator (detta gäller dock inte video). Det ger en större rörelsefrihet, dessutom går det snabbare för den vana fotografen att slänga eventuellt dåliga bilder direkt från kameran istället för att ta in dem i ImageBank först och sedan slänga dem. "Bevaka mapp" funktionen finns dock för dem som så önskar.

"Bevaka mapp" går även att använda efter man tagit bilderna d v s genom att man kopplar kameran till datorn med kabel och sedan aktiverar "Bevaka mapp". Det blir då en liknande funktion som "Importera allt". Om man önskar två olika definierade sökvägar kan detta således vara ett alternativ. Man kan behöva göra olika inställningar beroende på vilken kamera som används, kameratillverkarna har idag några olika lösningar.

Sökvägen för "Bevaka mapp" (och för "Importera allt") ställs in som fördefinierade sökvägar (under "Verktyg/Inställningar..." (se sid 56)).

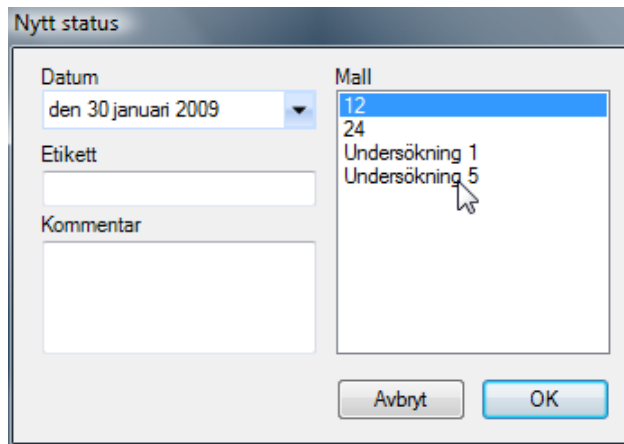

När en bild är exponerad i kameran som är uppkopplad mot datorn och ImageBank frågar programmet vilken typ av bildkarta ("Status") man vill använda. Välj ("12" i exemplet ovan) och bilden kommer in på vald statuskarta. Frågan kommer inte om det finns en bildkarta (status) sedan tidigare. Kommande bilder hamnar efter den första per automatik.

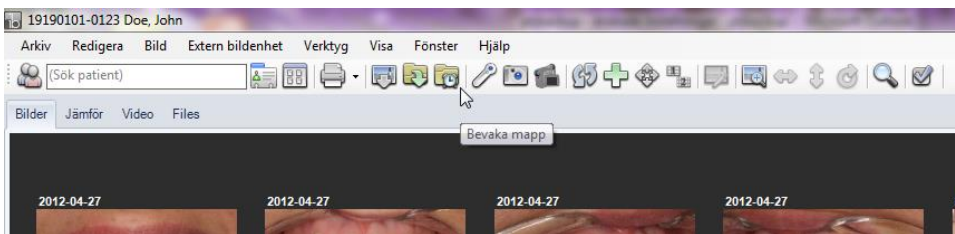


ImageBank fortsätter att bevaka och importera eventuellt nya bilder så länge "Bevaka mapp" ikonen är aktiverad. När den är aktiverad syns en blå ram runt ikonen (se ovan). Klicka på ikonen för att stänga av funktionen.

Via "Verktyg → Inställningar..." styrs vilken fördefinierad folder som funktionen bevakar.

BETRAKTA OCH VISA BILDER


Det finns 2 olika huvudvyer att se och hantera bilder på i ImageBank. **Bildkarta** samt **Redigerings-** och **Bildspelsvy**.

Bildkarta (statusvy). I vyn ser man aktuell bildkarta:

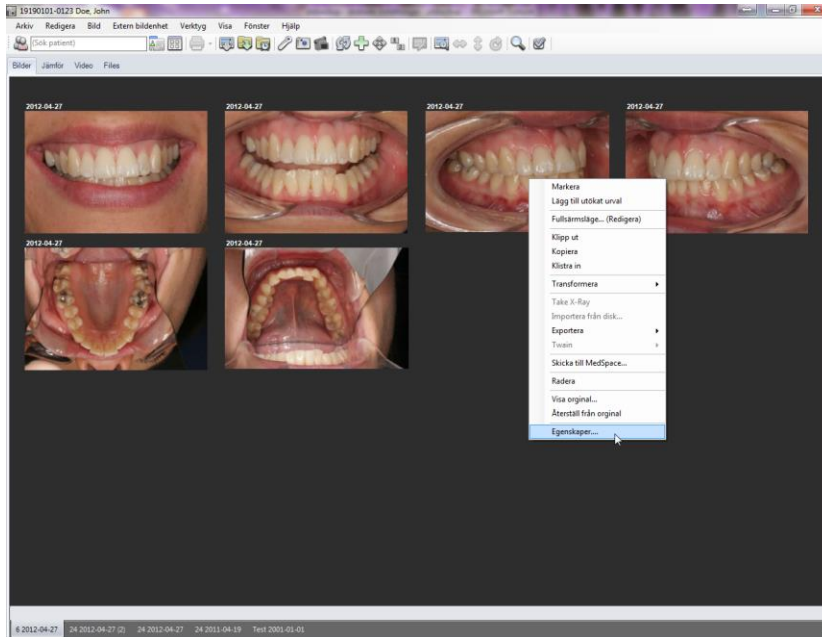

Högerklicka på en bild för vanliga genvägar. Byt bildkarta med hjälp av datumflikarna (nedre vänstra hörnet). Det går också att skifta mellan datumflikarna (i exemplet ovan finns ett gammalt status från 2006) med piltangenterna (höger- och vänsterpil) på tangentbordet. Programmet arbetar mycket snabbt även om det är många stora bilder.


Redigerings- och Bildspelsvy. Genom att dubbelklicka på en bild öppnar ImageBank ett redigeringsläge med markerad/e bild/er. Här kan man göra olika typer av redigering som t.ex. rotering, spegelvända, justera ljushet/kontrast, göra annoteringar och mäta längd, vinklar, area mm. Eventuella ändringar kan sparas, originalbilden finns dock alltid kvar oberoende av de förändringar man utför. I samma vy kan man även visa bildspel.

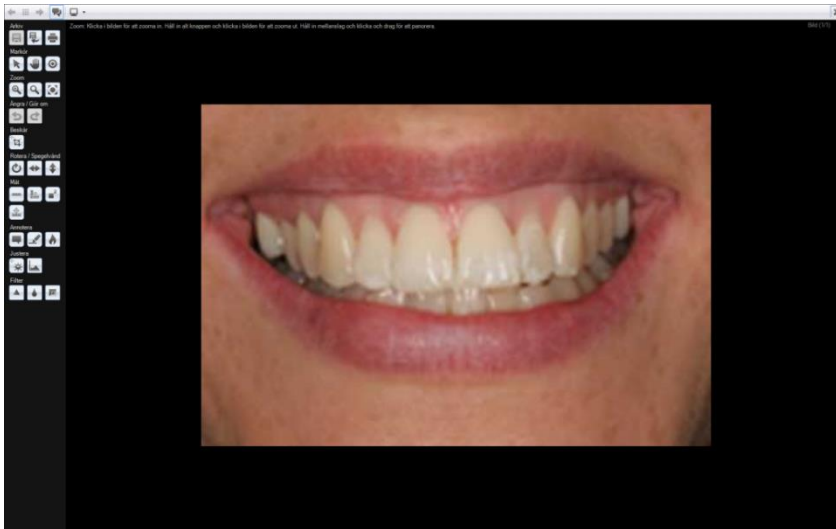

Redigeringsvyn (redigering av bild/er). Rotering av bild har aktiverats i exemplet ovan. Ikoner till vänster utför redigeringsuppgifter.

Mer om redigering på sid 30.


Bildspelsvy (samma vy som redigering). Detta läge är mycket användbart vid utbildning, granskning och patientinformation.

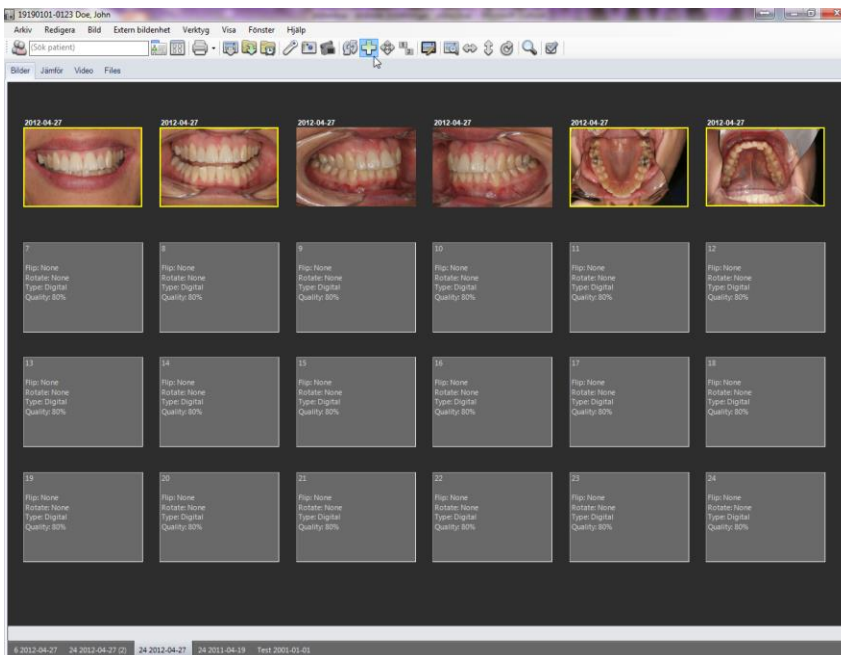

Först markerar man den/de bilder på bildkartan man vill visa/betrakta/redigera. Markera går att göra på olika sätt. Högerklicka och välj "Markera", fortsätt och markera fler bilder. Alternativt klicka på en bild och håll därefter ner CTRL- tangenten (Windows standard) och

fortsätt klicka på fler bilder så markeras även de. Snabbaste sättet att markera samtliga bilder på en karta är att klicka på ikonen [Markera allt] alternativt kortkommando Ctrl+A. Ovan är 4 bilder markerade (gul ram).


När bilderna är markerade kan man gå in i bildspelsvyn (tillika redigeringsvyn) genom att klicka på ikonen [Fullskärmsläge](Redigera), (kortkommande CTRL+F). Ett annat alternativ är att högerklicka på en av de markerade bilderna och välja "Fullskärmsläge...".

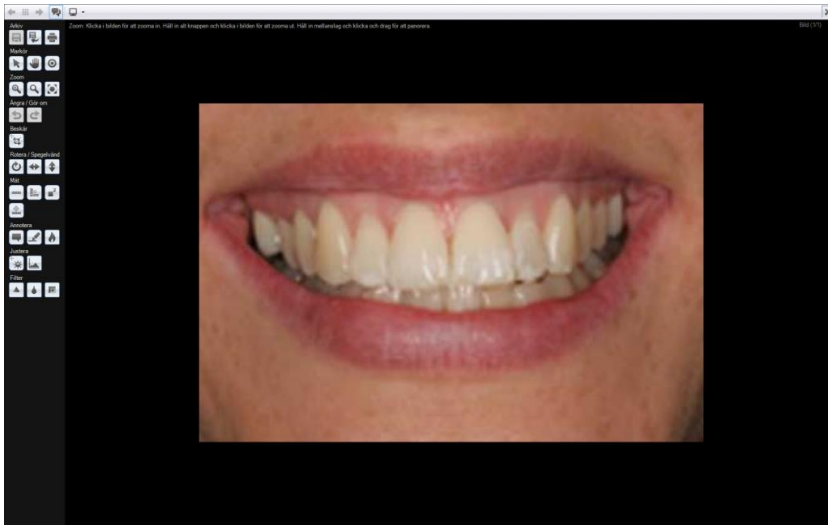

I Redigerings- och Bildspelsvyn kan man dels titta på bilderna i större storlek dels redigera varje enskild bild. Man avancerar i bildspelet med pilarna uppe i vänstra hörnet alternativt med piltangenterna på tangentbordet. I högra hörnet ser man vilken bild som är aktiv och hur många bilder som ingår i valet. I detta exempel bild 1 av 4 (1/4). I denna vy är personuppgifter inte synliga.

Bildspelsvyn går att nå från andra menyer i ImageBank t ex från "Sök"- funktionen och kan då bestå av bilder från flera olika patienter. När man har ett informativt syfte (t ex patientinformation eller vid utbildning) med bilderna kan det vara lämpligt att personuppgifterna inte är synliga.

Mer om sökfunktionen på sid 45.

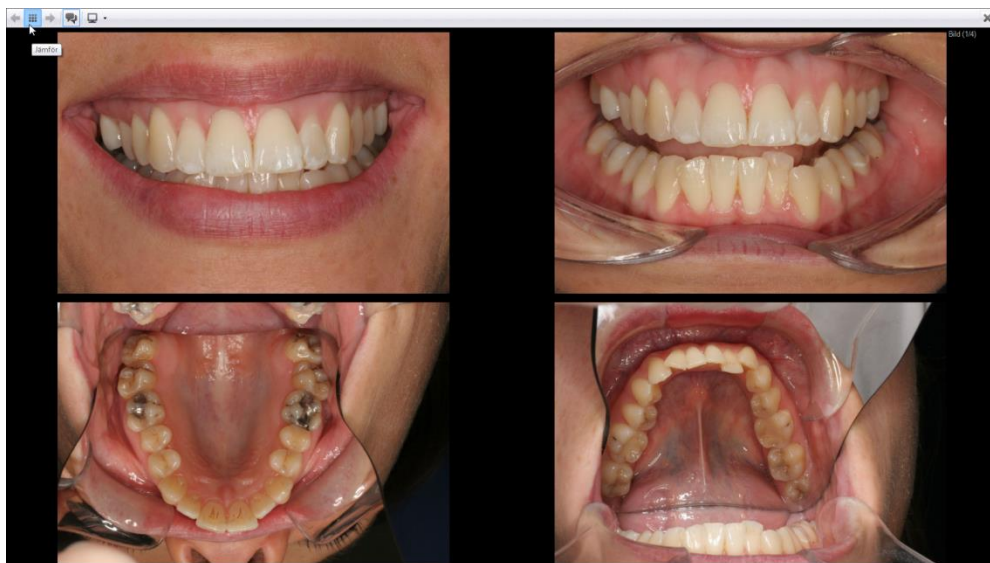


Med "Jämför"-ikonen (vänstra hörnet) ser man samtliga valda bilder bredvid varandra. Om man håller musen och vänsterklickar över en bild samtidigt som man rör musen förändrar man ljusstyrka/kontrast tillfälligt. Denna funktion är främst till hjälp om det är röntgenbilder som ska granskas/visas.

Klicka [Jämför]-ikonen igen för att återgår till en bild i taget. Alternativt dubbelklicka i en bild så startar bildvisning på den bilden.


"VISA ALLA BILDER PÅ EN PATIENT" OCH FLYTTA BILDER MELLAN PATIENTER

Om man har många datumflikar på samma patient kan man välja att se patientens samtliga bilder i ett separat fönster.

Fönstret kan också användas för att flytta felplacerade bilder mellan patienter eller om man har separata "fiktiva" patienter där man samlar fall för informations- och utbildningssyfte.

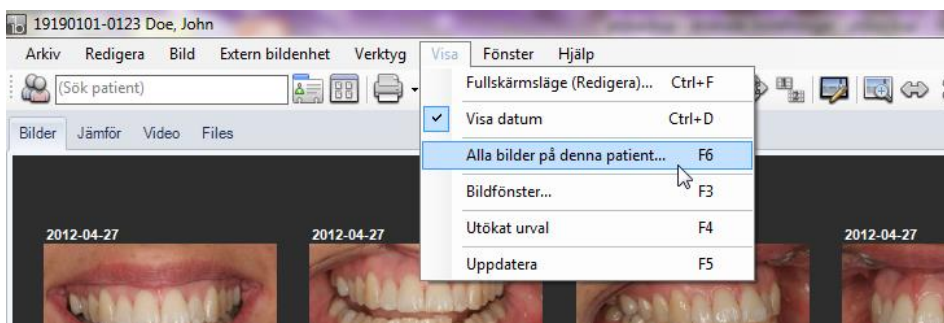

Välj "Alla bilder på denna patient" (kortkommando F6) för att öppna ett separat fönster med patientens samtliga bilder.

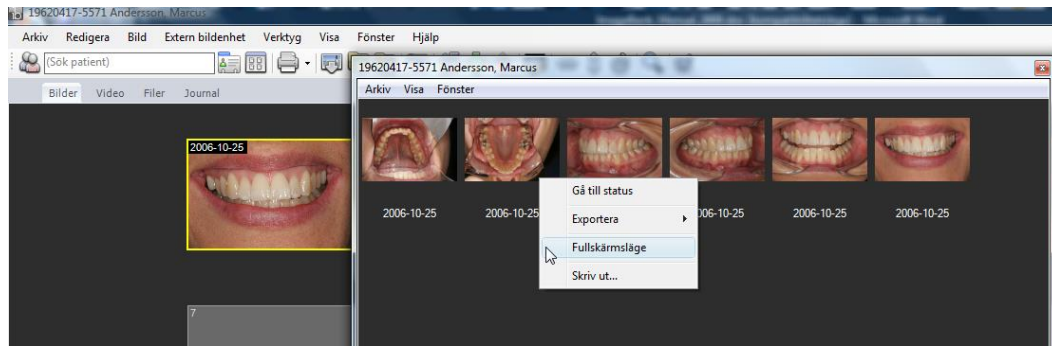


Fönstret öppnas ovanpå ImageBank och kan ställas in i passande storlek. Patientens samtliga bilder finns för åtkomst.

Man kan markera flera bilder genom CTRL+klick och sedan "*Exportera*", titta i "*Bildspel*" eller skriva ut "*Skriv ut*".

"*Gå till status*" tar en till det status där bilden ligger.

Om man vill flytta bilder mellan patienter kan man öppna en ny patient (behåll översiktsfönstret/F6 öppet). Då kommer den förra patientens bilder finnas i översiktsfönstret och den nyöppnade patienten i ImageBanks vanliga fönster. Man kan då dra bilder genom "vänsterklick" ("drag and drop") från den ena till den andra patienten. Det går även att dra bilder från ImageBank till andra program och eller mappar utanför ImageBank (enligt Windows "drag and drop" standard).

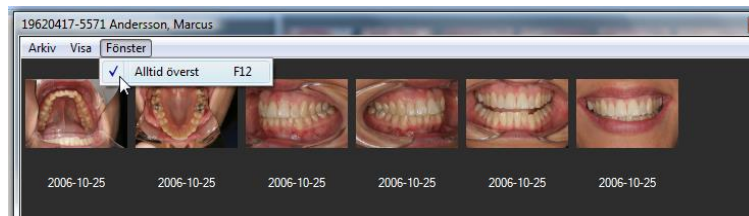


Genom att klicka "*Alltid överst*" (kortkommando F12) lägger man översiktsfönstret med patientens samtliga bilder ovanpå andra program. Det går då att arbeta i andra program men utan att översiktsfönstret hamnar bakom.

Ställ in storleken på översiktsfönstret efter eget tycke och smak.

EXPORTERA BILDER


Det är enkelt att exportera en eller flera bilder från ImageBank.

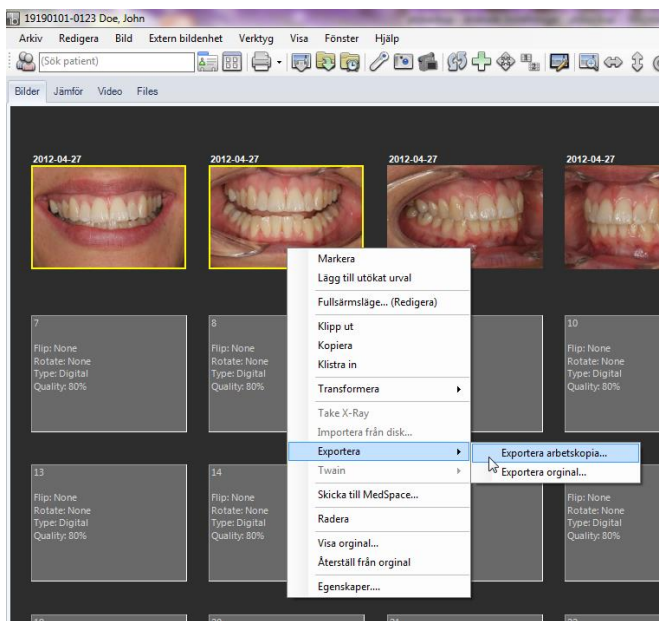

Markera först den/de bilder på bildkartan man vill exportera (gul ram är markerad). Markera går att göra på olika sätt. Högerklicka och välj "Markera", fortsätt och markera fler bilder på samma sätt. Alternativt klicka på en bild och håll därefter ner CTRL-tangenten (Windows standard). Snabbaste sättet att markera samtliga bilder på en karta är att hålla ner CTRL och bokstaven A, samma kommando går också att utföra med "+"-ikonen.

"Exportera arbetskopia" exporterar den komprimerade kopian med alla redigeringar som eventuellt är utförda på bilden. "Exportera original" exporterar filen som den såg ut vid import till ImageBank och utan eventuell redigering från ImageBank. Originalen är vanligtvis en större fil.

ImageBank sparar alltid originalbilden vilka förändringar man än gjort med bilden (patientdatalagen). Det vanliga är att man vill exportera sin kopia som ofta är mindre och kanske redigerad, t ex spegelvänd eller roterad.

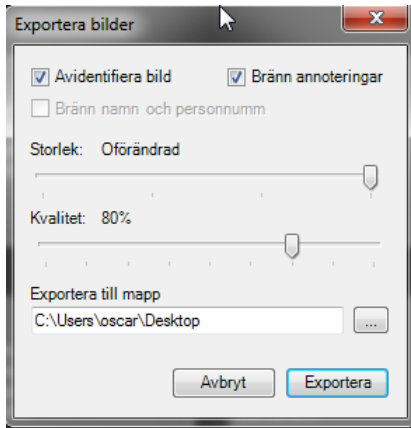


[Avidentifierad bild]. Tar bort all patientdata från filen.

[Bränn namn och personnummer] lägger till uppgifterna på bilden.

[Bränn annoteringar]. Skriver ut annoteringar på bilden (som är utförda i redigeringsvyn).


[Storlek och Kvalitet] kan justeras efter önskemål.

[Exportera till mapp] välj vart du vill exportera bilden/bilderna

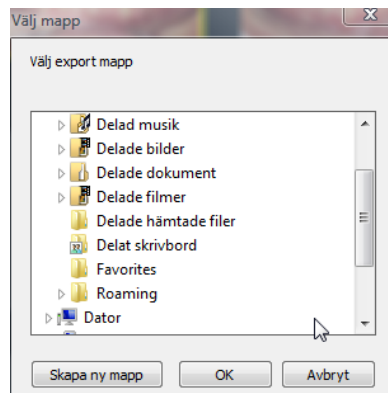


Klickar du på knappen med [...] öppnas Windows utforskaren och låter användare specificera en mapp eller disk man vill lägga bilden/bilderna på. Det går också att skapa en ny mapp t ex med patientens eller mottagarens namn på. Klicka i så fall på knappen [Skapa ny mapp] och döpa mappen.

Om man vill flytta bilder mellan patienter kan man exportera bilderna till en mapp enligt ovan och sedan importera dem via mottagande patient i ImageBank. Ett alternativt sätt kan man läsa om under "Visa alla patientens bilder/Flytta till annan patient" på sid 23.

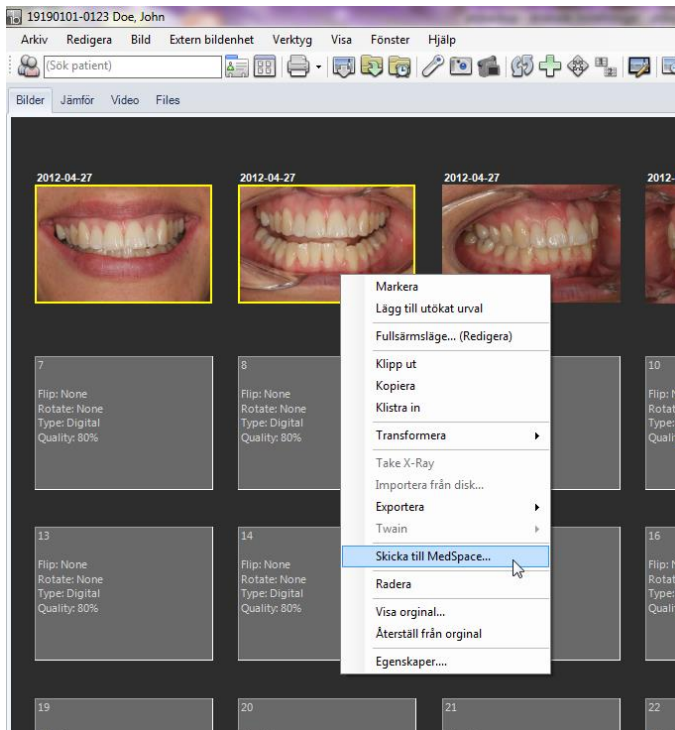

ImageBank har en webbaserad e-postklient (utvecklad av teamet bakom ImageBank) som SSL-krypterar all kommunikation via e-post (patientdatalagen). Programmet heter MedSpace (exempel nedan). Genom att markera en eller flera bilder och högerklicka samt välja "Skicka till MedSpace" så exporteras och krypteras bilden.

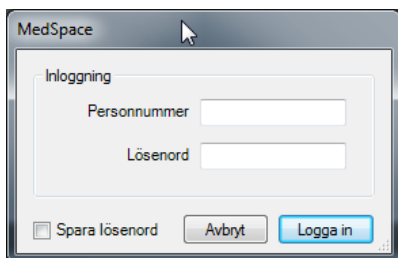

Du får först upp ett inloggningsfönster för MedSpace där du fyller i ditt personnr. (12 siffror) samt ditt lösenord. Du kan här välja att spara dina inloggningsuppgifter genom att bocka för rutan "spara lösenord". Om ni är flera på kliniken som använder MedSpace och Imagebank för att skicka bilder rekommenderas ni att ej spara lösenordet då kollegor möjligen vill logga in med sitt eget konto för att skicka bilder via MedSpace.


Efter att ha loggat in får ni upp ett litet fönster där ni kan välja om ni vill skapa ett nytt ärende eller komplettera ett befintligt ärende.

The screenshot shows a window titled "MedSpace" with a close button in the top right corner. The window contains a form with the following sections:

- Befintliga ärenden:** A group box containing four radio buttons: "Nytt ärende" (selected), "Senaste 10", "Denna patient", and "Ärendnr."
- Patientinformation:** A section with three input fields: "Personnummer" (containing "19701224-1233"), "Förnamn" (containing "Nils"), and "Efternamn" (containing "Tandlös"). There is a "Rensa" button to the right of the "Efternamn" field.
- Ärendeinformation:** A section with a single input field labeled "Ärendetitel".
- Kvalitet:** A section with two radio buttons: "Hög" and "Låg" (selected). There are also "Avbryt" and "Skicka" buttons at the bottom right of the form.

"Nytt ärende" öppnar ett nytt ärende med önskad titel i MedSpace. Om exporten ska till ett befintligt ärende i MedSpace kan man välja mellan "senaste 10", "Denna patient" samt "Ärende nummer".

- "Senaste 10": Listar upp dom 10 senaste ärendena du skapat i MedSpace.
- "Denna Patient": Listar upp alla ärenden med samma patient uppgifter som bilden från Imagebank har.
- "Ärende nummer": Låter dig fylla i ärende numret dit bilden/bilderna ska.

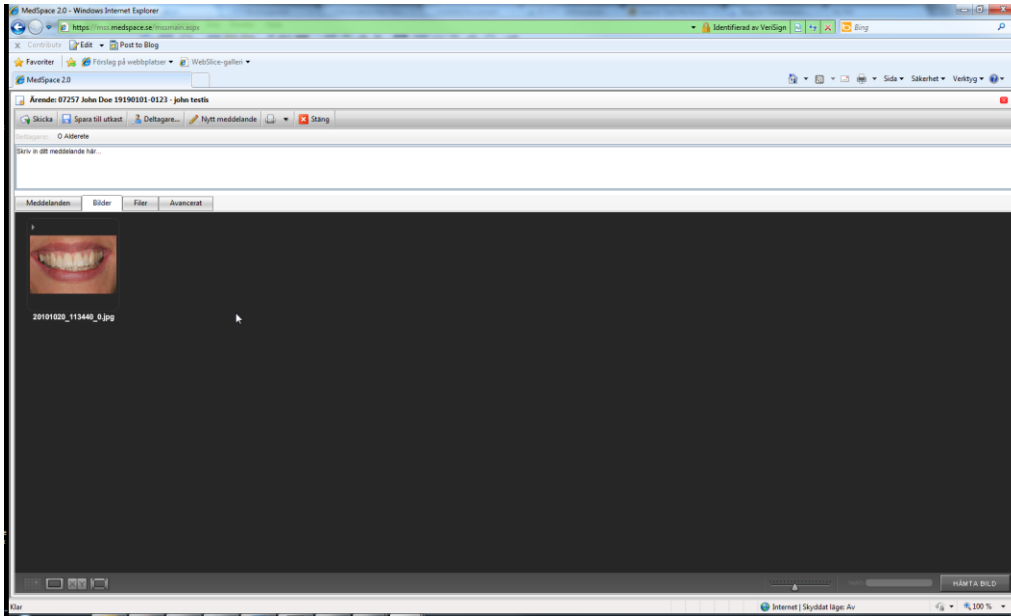

MedSpace (ovan) är en separat helt webbaserad e-postklient som krypterar (SSL) all kommunikation t ex remisser och kommunikation med Försäkringskassa och försäkringsbolag. MedSpace är ett exempel på hur ImageBank enkelt kan kopplas mot andra applikationer. MedSpace är utvecklat av teamet bakom ImageBank. I fallet ovan har bilderna exporterats tillsammans med patientuppgifterna, ärendet kan sedan skickas till en annan MedSpace användare eller till någon extern e-post adress.

REDIGERA BILDER


ImageBank har en effektiv redigeringsfunktion som man når genom att dubbelklicka på en bild i ett status (kortkommande CTRL+F). Alternativa vägar är [Fullskärmsläge (redigering)]-ikonerna eller att högerklicka på en bild och välja "Fullskärmsläge...".

Enklare justeringar kan man göra via "Spegelvänd" eller "Roterar"-ikonerna alternativt via högerklick enligt nedan utan att gå in i "Fullskärmsläge...(Redigera)".

Markera en eller flera bilder på en bildkarta och högerklicka.

1. Välj "Transformera/Spegelvänd vertikalt" (eller något av de andra alternativen t ex "Roterar").
2. Förändringen sker automatiskt på alla de markerade bilderna. Ett bra exempel på ImageBanks effektiva flöden.
3. Mer avancerad redigering sker genom att högerklicka och välja "Fullskärmsläge... (Redigera)" mm.

Se exempel nedan:

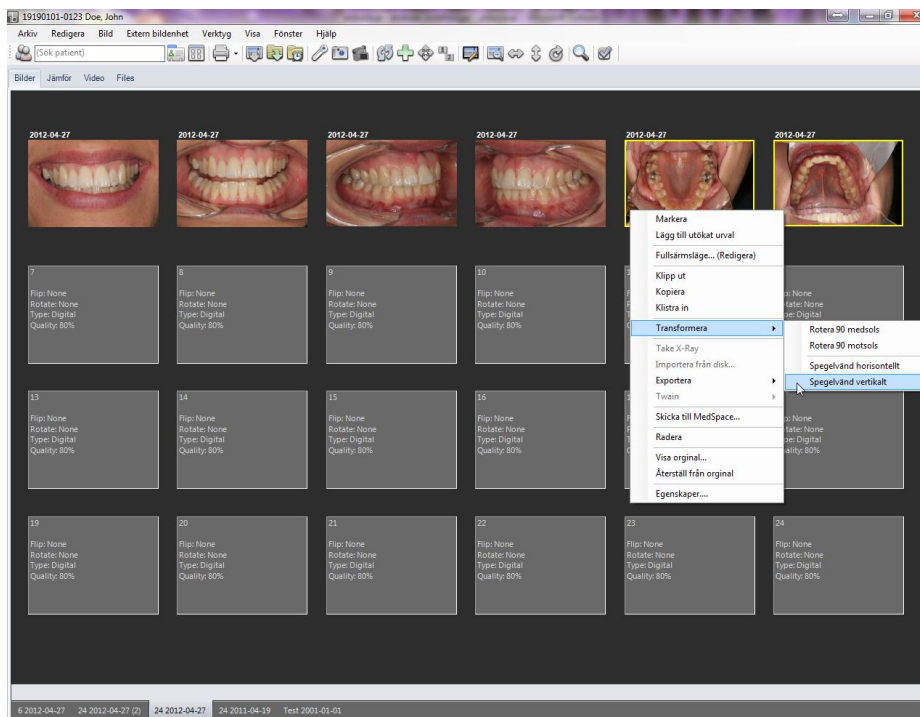


Markera de bilder som ska förändras. Markering kan göras enligt Windows standard dvs håll ner CTRL-knappen samt klicka på första bilden, fortsätt att hålla ner CTRL-knappen och klicka på nästa bild. Ett alternativ är att högerklicka på respektive bild och välja "Markera".


Om man vill markera samtliga bilder på bildkartan utförs det med kortkommandot CTRL+A (eller [+] -ikonen i ImageBanks menylister). Många vägar bär till Rom...

Högerklicka på en av de markerade bilderna och välj "*Transformera/Spegelvänd Vertikalt*" så spegelvänds båda bilderna på en gång. Andra program behöver ofta öppna redigeringsläget för att utföra rotering mm.

Längre ner på menyn finner man "*Återställ från original*", vilket återställer till ursprungsbilden utan justeringar. Man kan således göra vad man vill med bilden i ImageBank (bortsett från att slänga den) och det kommer alltid att finnas kvar ett original. Om man vill behålla en redigerad bild men titta på ursprungsbilden väljer man "*Visa original...*" så ser man den/de markerad bilden/bilderna oredigerade i fullskärmsläge.

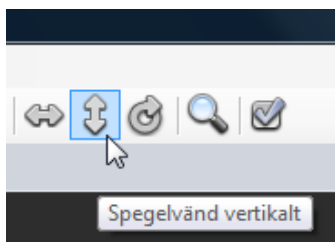


Båda bilderna är roterade på någon sekund. Det finns även andra sätt att utföra samma kommandon till exempel via ikonerna på menylisten (se ovan).

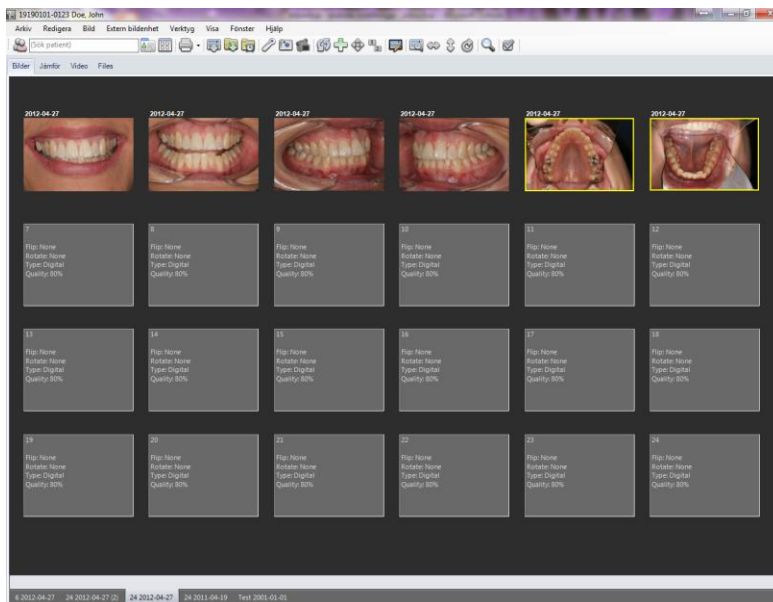


Och bilderna på över- och underkäken (bild 5 och 6) är nu vända och korrekta.

Automatisk redigering vid import. Vid mer rutinmässigt återkommande statusfotografering kan man skapa egna mallar som utför rotering automatisk vid importen. När man har klickat på [Importera allt] kan det se då se ut så här:

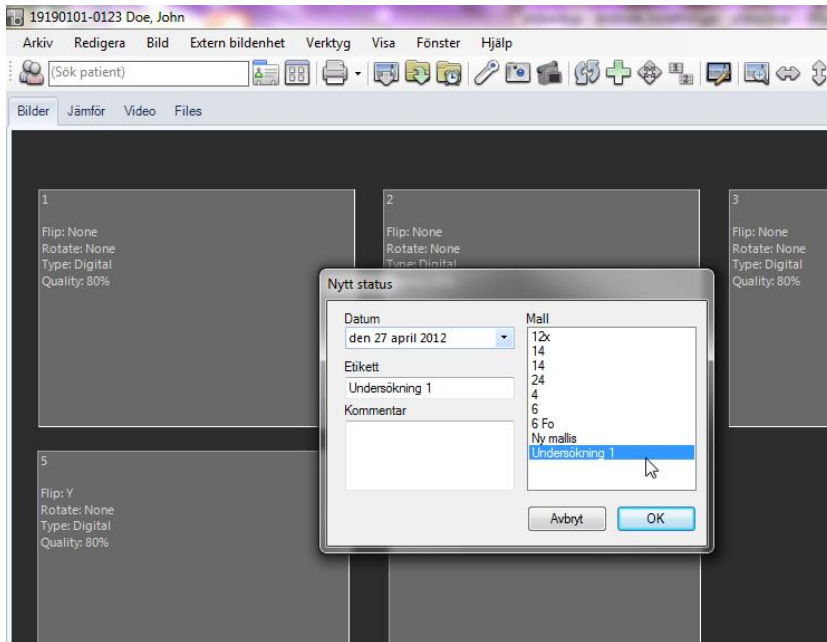


Vi väljer nu en fördefinierad bildkarta som heter "Undersökning 1". Denna har vi skapat med vissa egenskaper vilket innebär att bild nummer 5 och 6 automatiskt spegelvänds i samband med importen vilket ytterligare snabbar på processen.

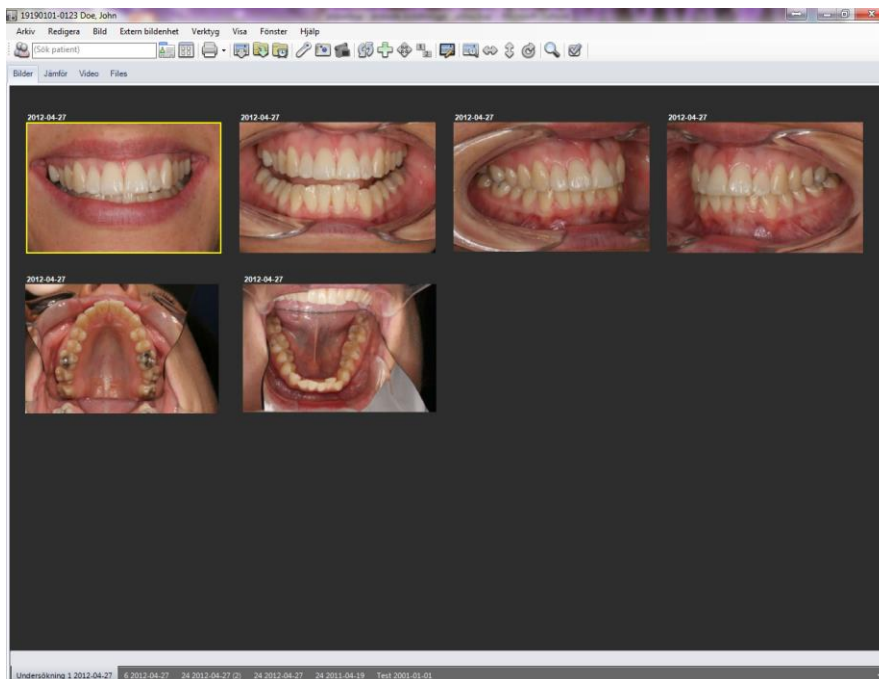

Här behöver vi således inte markera och högerklicka samt välja att bilderna ska spegelvändas. Denna bildkarta vet om att bild nummer 5 och 6 (över- och underkäken) är tagna med spegel och ImageBank utför då roteringen omgående i samband med importen. Detta är ett tillvägagångssätt vi rekommenderar i de fall man har rutinemässiga och återkommande registreringar.

När man bygger sina fördefinierade mallar kan man göra bilderna olika stora. Mer information på sid 51.

”Fullskärmsläget... (Redigering)” Används till att visa och betrakta en eller flera bilder (mer om att visa bilder på sid 19) och till att redigera.

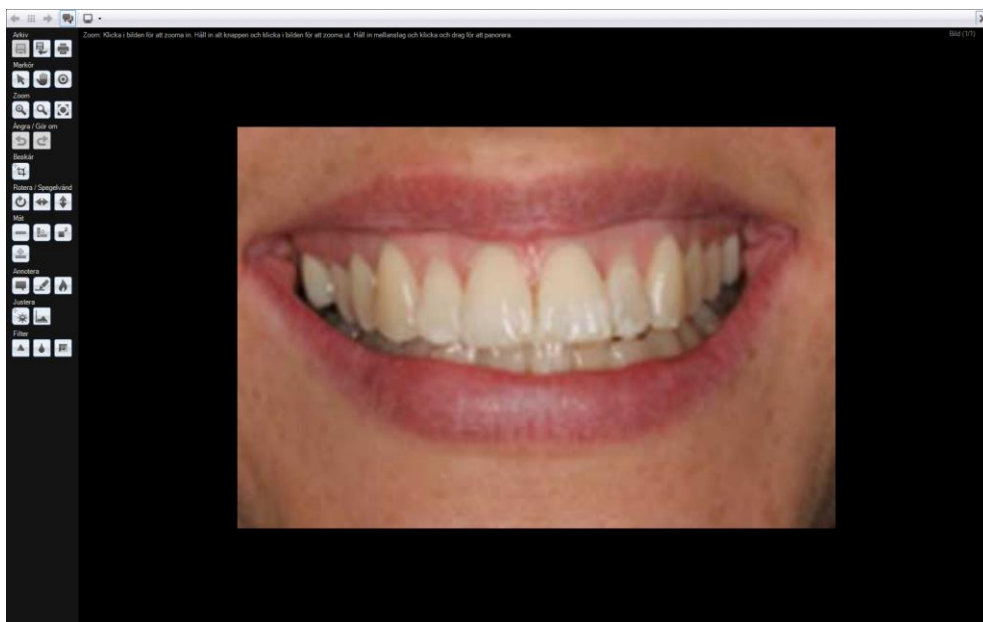


Med redigeringsikonerna till vänster har man ett kraftfullt och effektivt verktyg.

REDIGERINGSVERKTYG



Varje ikon som beskrivs nedan har en hjälptext i ImageBank som syns när ikonerna är aktiva. Här visas texten för mätning av en area/yta.

Ikonerna är:

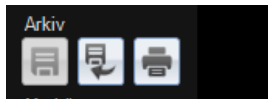

[Spara] utförda justeringar (originalbilden finns dock alltid kvar i ImageBank).

[Återställ bilden], ta bort justeringar/återställer till originalet.

[Skriv ut] aktiv bild (den som visas).



[Pekare]. Markera ett objekt t ex en annotering/text för att kunna flytta den i bilden eller ta bort den.

[Panorera] När en bild är förstord (inzoomad) panorerar man med musen när ikonen är vald.


[Spot] Muspekaren blir en "Spotlight" så fort den dras över bilden. Spot effekten ökar ljus styrka och kontrast på det markerade området (Utan att redigera bilden) vilket är användbart till framför allt röntgenbilder. Det går att utöka/minska spot:ens diameter genom att använda scroll knappen på musen.



[Zooma in/Zooma ut]. Klicka i bilden för att Zooma in. Håll in Alt-knappen och klicka i bilden för att zooma ut. Håll in mellanslag och klicka och drag för att panorera i bilden.

[Förstoringsglas]. Klicka i bilden och ett begränsat område förstoras.


[Anpassa storlek till skärm]. Om bilden är så pass stor att den inte får plats att visas hela över skärmen

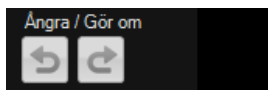

[Ångra/Gör om] senaste justeringar (alternativet är att "Återställa bilden" enligt ovan)





[Beskär]. Klicka och håll ner vänster musknapp och dra för att markera en yta. Ramen går därefter att justera. Dubbelklicka i markeringen för att utföra vald beskärning.

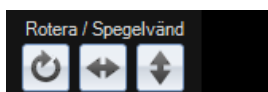

[Rotera] öppnar en dialogruta enligt nedan. Rotera bestämda grader eller välj "Rotation". Det går även att välja bakgrundsfärg (svart rekommenderas). Klicka [OK].

[Spegelvänd] horisontellt och vertikalt utförs momentant vid klick.

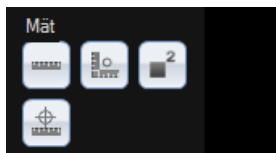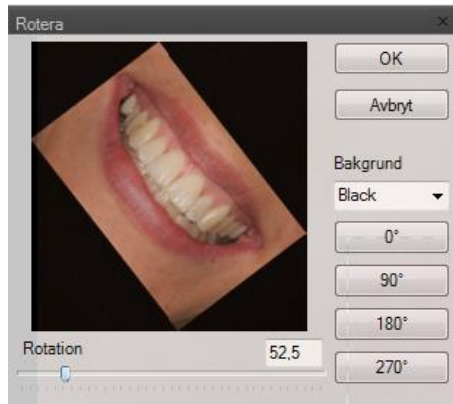


[Mät sträcka]. Klicka i bilden för att mäta sträckan. Högerklicka för att avsluta.

[Mät vinkel]. Klicka tre punkter i bilden för att beräkna vinkeln.

[Mät area]. Klicka i bilden för att rita en polygon. Högerklicka för att avsluta.

[Kalibrera]. Klicka på två kända punkter i bilden och skriv in "Längd" samt välj "Enhet" (t ex mm, cm eller dm). OBS! Du måste kalibrera bilden innan mät verktygen kan användas. Om du försöker att mäta utan att kalibrera bilden kommer du att bli ombedd att kalibrera den. Om du väljer nej vid förfrågan kommer dina mätningar visa noll enheter.

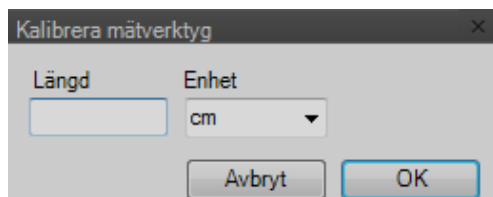



[Textannotering]. Klicka två punkter på bilden för att skapa en textruta. Dubbelklicka i textrutan för att skriva in text.

[Linjeannotering]. Klicka två punkter i bilden för att rita en rät linje.



[Bränn annoteringar till bild] (originalbilden finns dock alltid kvar i ImageBank).



[Ljusstyrka/kontrast - markör] öppnar en liten meny(B, C resp. G för justering) rad i mitten längst ned på skärmen enligt nedan. Justera Ljusstyrka, Kontrast, Gamma. Du kan även använda muspekaren för att justera värdena (Se bilden till höger).

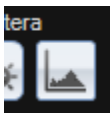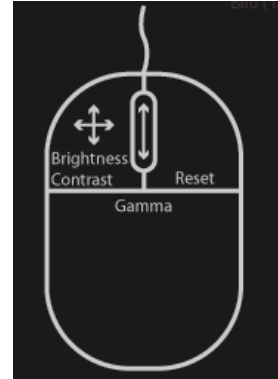

[Histogram/Nivåer]. Det här är ett lite mer avancerat verktyg för att ändra gamma, kontrast och ljusstyrka med en god överblick.

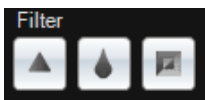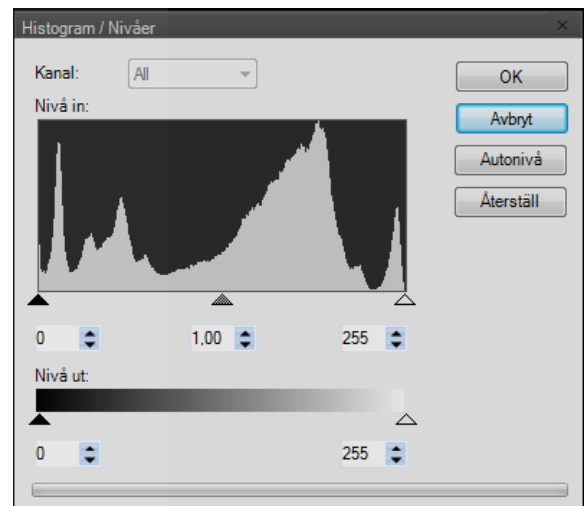

[Filter]. Det finns tre st. olika filter att anpassa. Skärpa, Median och Invertera.

[Skärpa], justera skärpan på bilden.


[Median], justera bildens median

[Invertera], invertera bildens färger.

SKRIVA UT BILDER


Det går att skriva ut bilder på tre olika sätt i ImageBank. "Skriv ut markerat", "Skriv ut allt" och "Skriv ut status".

1. "Skriv ut markerat". Markera den/de bilder man vill skriva ut.
2. Välj "Arkiv →Skriv ut" och följ därefter anvisningarna.

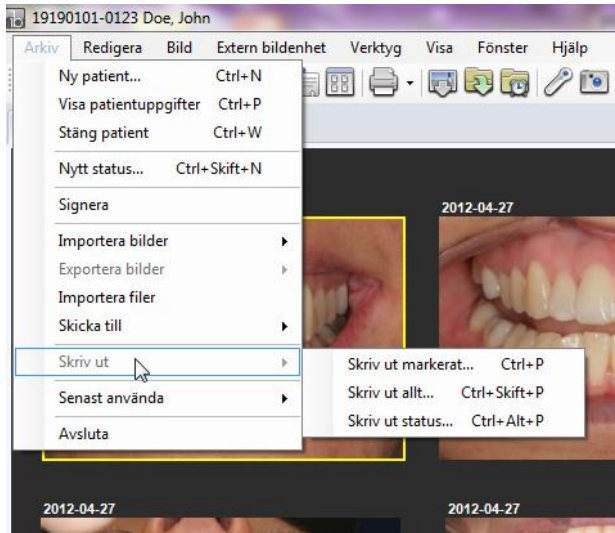


Om man vill skriva ut ett befintligt status "Skriv ut status" med samtliga bilder så väljer man "Arkiv →Skriv ut status" (kortkommando CTRL+Alt+P). Man får då en utskrift som är precis som ditt status fönster/status mall. Om man vill skriva ut samtliga bilder på statuset och sprida dem över flera papper med olika storlekar väljer man "Skriv ut allt". Då får man upp ett fönster med där man kan välja Layout och om person uppgifter ska synas på utskriften.


Skriv ut alla bilder på alla bildkartor

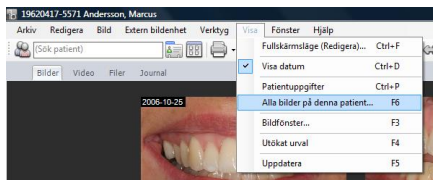

För att skriva ut samliga bilder som finns på en specifik patient så öppna först fönstret "Alla bilder på denna patient...".

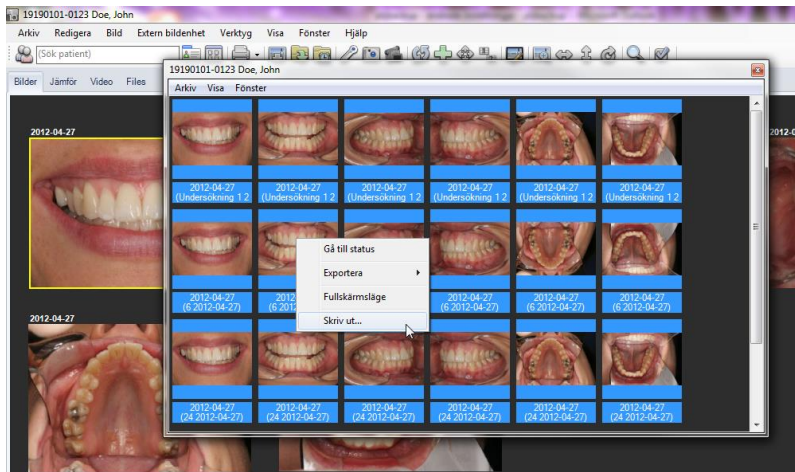

Markera de bilder som ska skrivas ut (i exemplet ovan är det samtliga, blåmarkerade), högerklicka och välj "Skriv ut...".

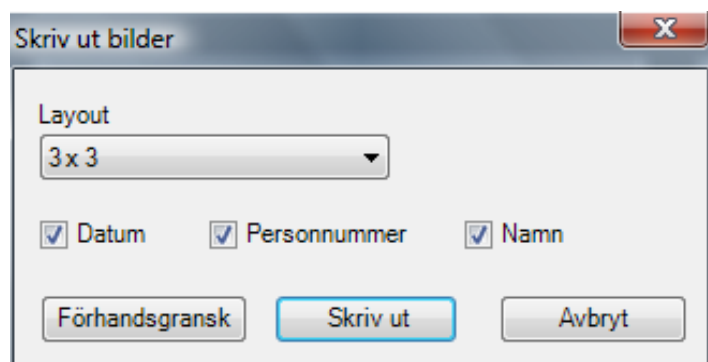

Skriv ut bilder dialogruta ger ytterligare möjligheter. Välj om utskriften ska innehålla "Datum, Personnummer och/eller Namn. Förhandsgranska vid behov.

EGENSKAPER HOS BILDER


Bilder i ImageBank har olika egenskaper (Högerklicka på bilden välj "Egenskap"). Det kan vara datum, bildinformation från kameran som finns med på bilden, kvalitet på bildens redigerade kopia, sökord, typ av bild, anatomiskt område mm.

Vissa egenskaper är förbestämda som till exempel datum och information från kameran medan till exempel bildkvalitet och sökord kan läggas till automatiskt vid import av bilden med hjälp av bildkartan (som förinställts via "Verktyg → Mall hanteraren..."). Det går också i efterhand på respektive bildkarta att lägga till bildinformation direkt på en eller flera bilder.


Genom att högerklicka på en befintlig bild på en bildkarta i ImageBank ser man de egenskaper som är indexerade till bilden.

Tanken bakom bildens "Egenskaper" är att man kan söka över samtliga bilder på flera olika sätt vilket gör ImageBank till en mycket effektiv sökmotor (BildBank) till exempel för att finna specifika fall för att kunna demonstrera något speciellt för en patient eller kanske för uppföljning/kvalitetssäkring/vetenskap/utbildning mm.

Läs mer om den effektiva sökfunktionen på sid 42.

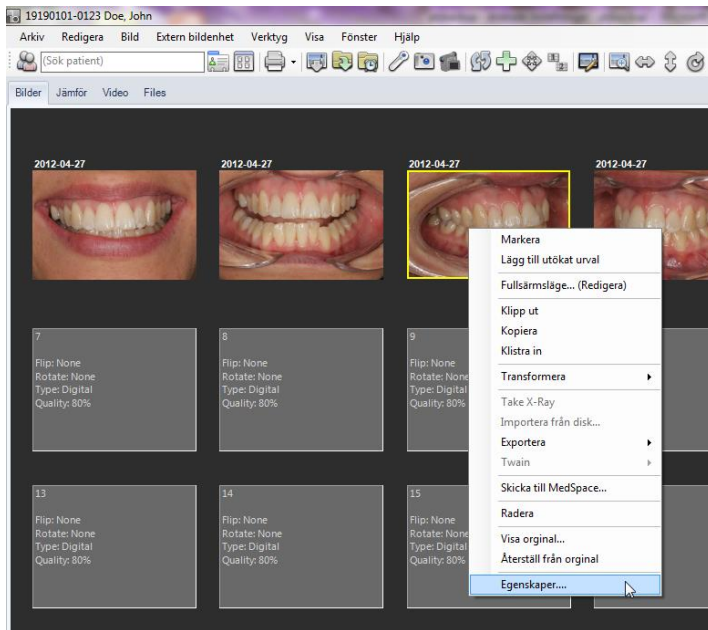

Genom att markera en bild och högerklicka når man bildens egenskaper via "Egenskaper".

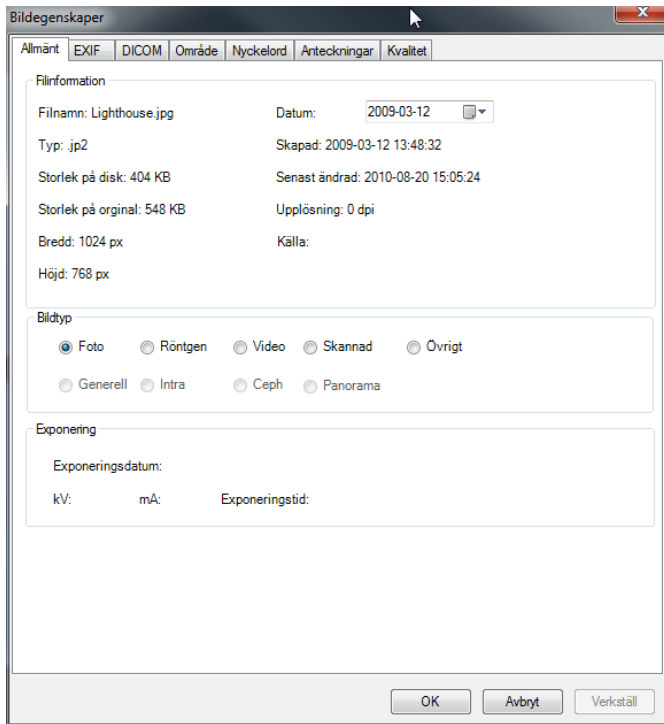

Egenskaper har 7 st flikar:

1. **Allmänt:** Här finner man allmän information som Storleken på originalbilden, och kopian ("Storlek på disk"). ImageBank sparar (patientdatalagen) alltid både en kopia och originalbilden, bildtyp, datum för import (här kan man ändra datum som visas till bilden) mm.
2. **EXIF:** Detta är den information som en digital kamera idag bifogar med bilden vid import till ImageBank. Denna information går inte att ändra på.
3. **DICOM:** Om bilden är en dicom bild kommer informationen att hamna här.
4. **Område:** Definierar vilken/vilka områden på kroppen/munen som är med på bilden.
5. **Nyckelord:** Fördefinierade nyckelord.
6. **Anteckningar:** Fritext fält där man kan skriva vad man önskar i fritext.
7. **Kvalitet:** ImageBank lägger alltid upp en kopia av den ursprungliga bilden. Denna kopia kan man bestämma kvaliteten på. Högre kvalitet = större bildfil. Det är kopian som används när man manipulerar bilden t ex beskär den eller justerar kontrast. Originalen kvarstår således alltid för att följa direktiven i patientdatalagen.


Allmänt, Nyckelord, Område och Anmärkningar går att ställa in på flera bilder samtidigt genom att markera flera bilder på samma bildkarta och därefter välja "Egenskaper". De

eventuella inställningar som då görs påverkar alla de markerade bilderna automatiskt. Om bara en bild är markerad när man högerklickar kommer bara den bilden påverkas.

Om man t ex har en patient kan man markera en före- och efterbild, högerklicka på en av bilderna, välja "Egenskaper/Anteckningar" och skriva in sökordet. Om man i framtiden söker på sökordet får man bara upp före- och efterbilderna (istället för samtliga patientbilder). Man behöver då inte visa andra bilder på denna patient, man behöver heller inte visa patientuppgifter som namn, personnummer mm.

Allmänt, Område, Nyckelord, Anteckning och Kvalitet går dessutom att fördefiniera i respektive bildkarta via "Verktyg → Mall hanteraren...". Detta kan underlätta vid import av mer rutinmässiga återkommande bildsekvenser.


OMRÅDE

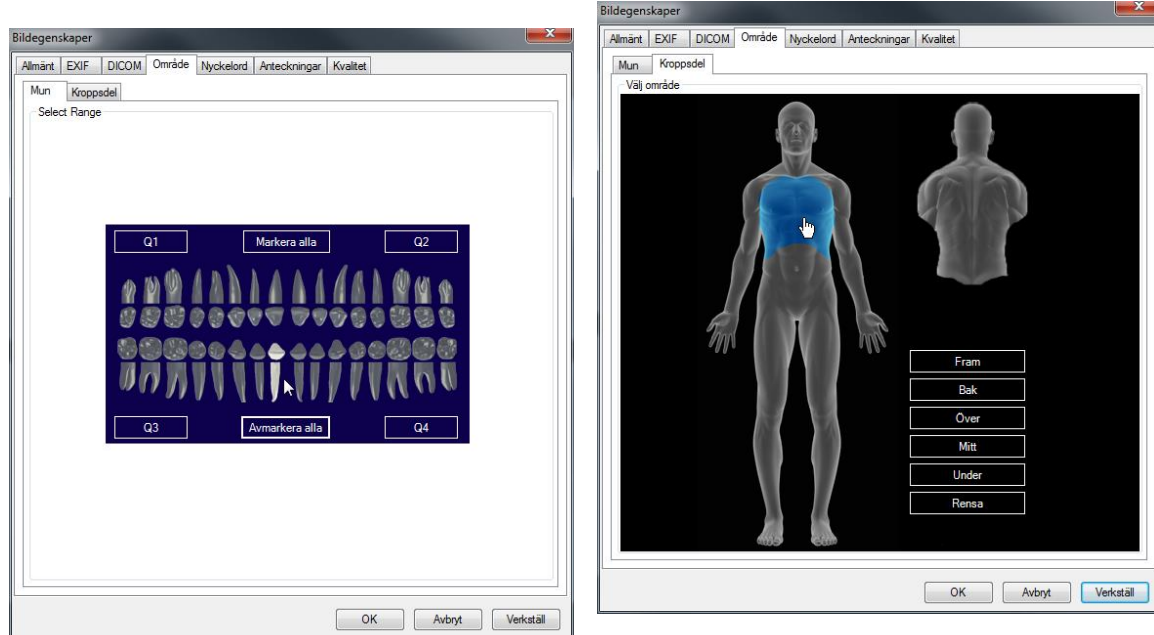


Här kan man indexera bilden efter anatomiskt område. Klicka på kroppen/tänderna eller på texitrutorna. Område kan även definieras i Mallhanteraren (sid 51) för rutinmässiga och återkommandebildsekvenser.

ImageBank kan även skapa individuellt anpassade flikar. Exempel på en individuellt skapad mall för ett specialområde (dental finns dock inte med i normalversionen). En specialistenhet kan då skapa egna kvalitetskontrollerade mallar för global indexering av sin enhets data.

NYCKELORD

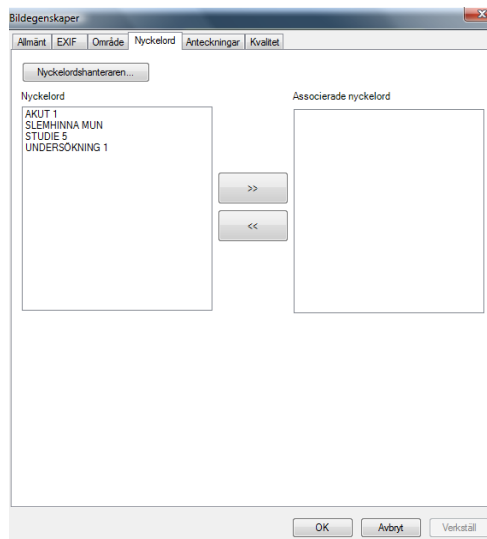

Nyckelord. Genom att välja något av nyckelorden i vänstra fältet och dubbelklicka eller klicka på högerpilen och därefter [OK] eller Verkställ så kommer bilden att vara associerad med det nyckelordet vid en sökning över samtliga bilder. Det går att ha flera sökord på varje bild. Sökorden redigeras via knappen "Nyckelordshanteraren..." eller via "Verktyg→Nyckelord...". Enheter/mottagningar kan således skapa egna eller globala nyckelord (index).

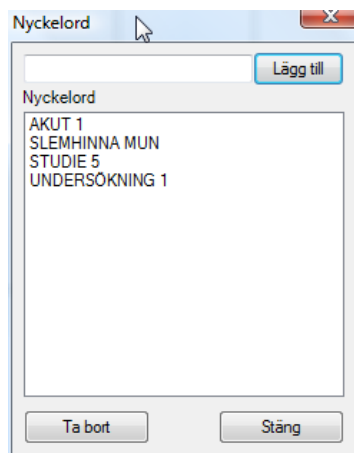

"Nyckelordshanteraren". Här lägger man till Nyckelord till sökfunktionen.


NYCKELORDSHANTERAREN

Med hjälp av mallar (status, bildkartor) kan man förbestämma specifika sökord. T ex "akut", "fraktur", "diagnos" osv. Nyckelord ger stora möjligheter till systematiserad sökning, uppföljning och kontroll över alla stora mängder material. Var noga med att tänka igenom val av Nyckelord. Ett alternativ är att använda "Anteckningar" (fritext).


För att lägga till/redigera Nyckelord i Nyckelords hanteraren gör så här:

1. Klicka på "Verktyg" och välj "Nyckelord...".
2. Skriv in ett genomtänkt "Nyckelord" (sökord). Klicka sedan på "Lägg till" och nyckelordet finns med på listan.
3. Nyckelord kan sedan användas för att märka en eller flera bilder (sid **Error! Bookmark not defined.**) i ett status eller till att söka bilder (sid 45) med via Sökfunktionen.
4. Är man osäker på vilka Nyckelord man eventuellt ska använda kan man börja med att istället märka bilder med hjälp av fritext.


Se exempel nedan:

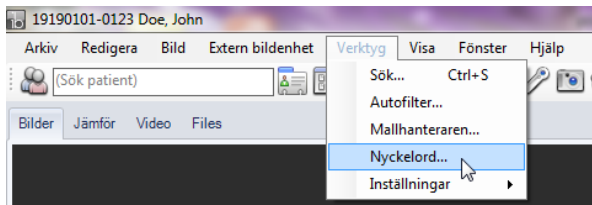

Öppna "Nyckelord..."

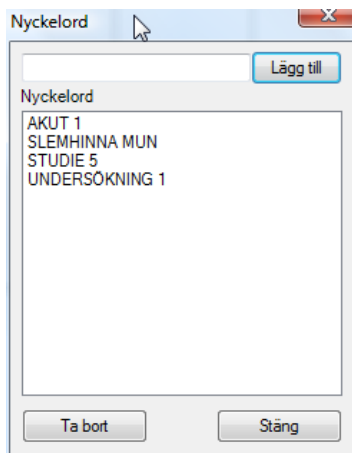


Man kan lägga till egna "Nyckelord" genom att skriva och sedan klicka på [Lägg till].

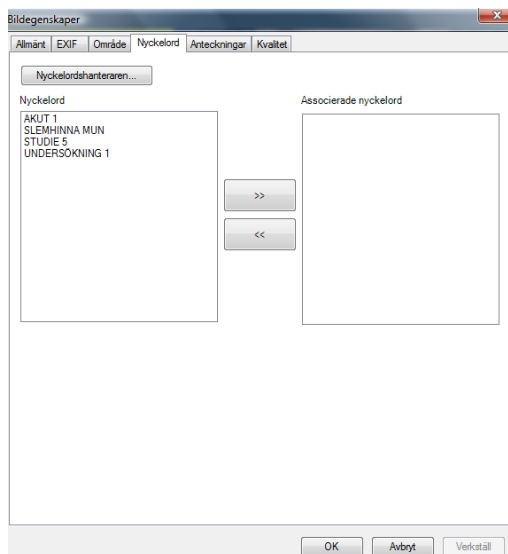

Nyckelorden kommer sedan att synas på bilders "Egenskaper". Mer om "Egenskaper" på sid **Error! Bookmark not defined.**


Läs mer om arkivering och sökning av bilder på sid 45.

ANTECKNINGAR

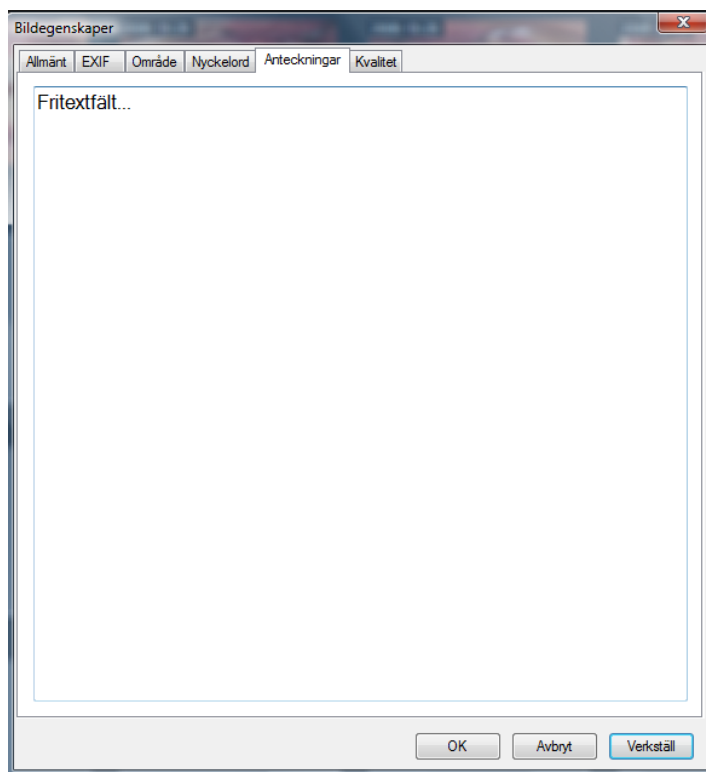

Anteckningar: Här kan man skriva fritext. Allt man skriver blir sökbart i sin helhet eller delar av texten.

KVALITET

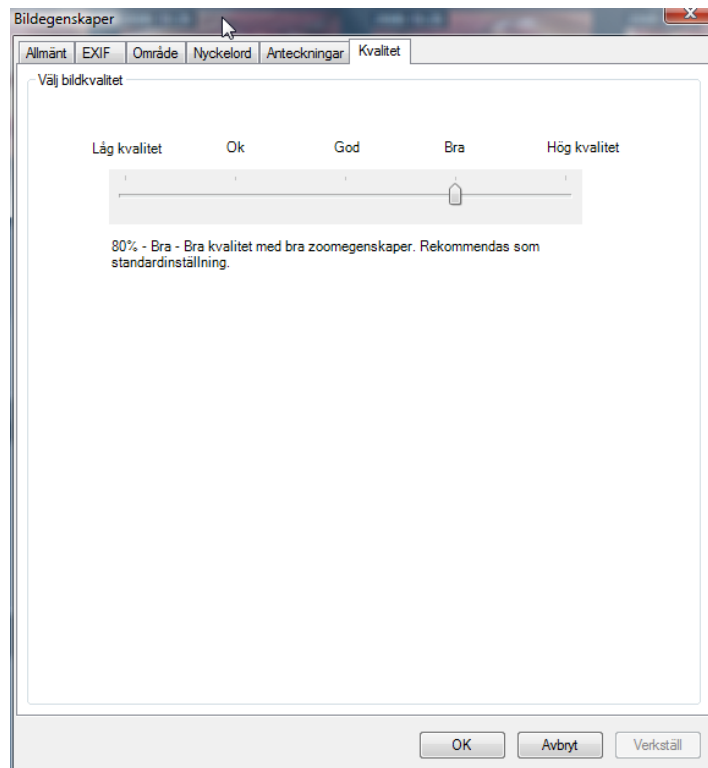


Kvalitet: ImageBank sparar alltid originalet av en bild (patientdatalagen), kopian som används när man redigerar och visar en bild kan man bestämma komprimeringsgrad på. Vanligtvis görs detta via "Verktyg → Mall hanteraren..." i samband med import av bilden via bildkartan. Det går alltid att återställa originalet av en bild i ImageBank.

SÖKFUNKTION

En viktig funktion i ImageBank är att man ska kunna söka bilder över hela databasen, och inte bara på en patient. Ett sökresultat ska kunna visas och exporteras enkelt. I vissa fall kunna skrivas ut och kanske exporteras. Om det är många träffar på en sökning kan man förfinas, till exempel med datumintervall.

Läs mer om hur man registrerar bilders egenskaper (hur man indexerar) på sid **Error! Bookmark not defined.**

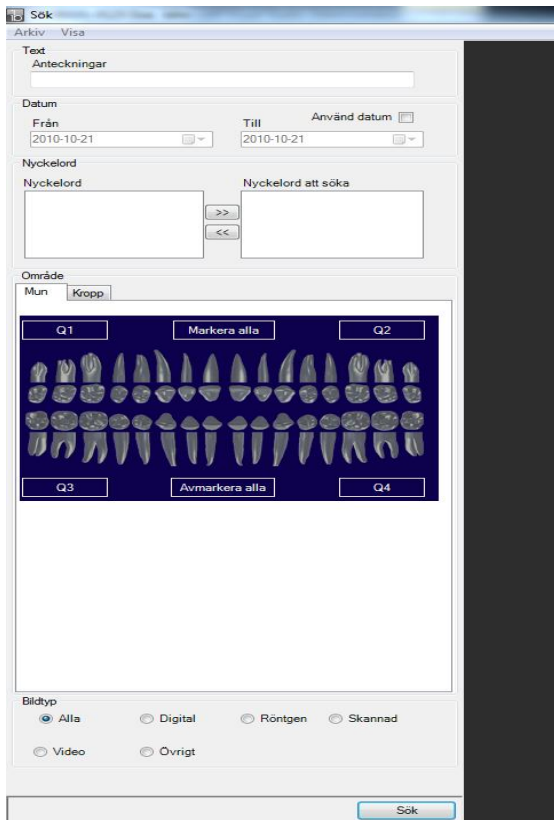

Sökfunktionen har 5 sökområden

"Anteckningar": Söker på fritext, delar av, eller hela textblock.


"Datum": Låter användare specificera ett datumintervall. Klicka först i boxen *"Använd datum"* och sedan på pilarna ("Från" och "Till"). ImageBank har en inbyggd kalenderfunktion.

"Nyckelord": Söker på fördefinierade nyckelord.


"Område": Söker områden på kroppen eller valda tänder som är med på bilden.

"Bildtyp": Söker över olika bildtyper som till exempel digital bilder, video, scannad mm.

När man definierat en sökning klicka på [Sök] (alternativt "Retur/Enter") och resultatet visas i högerspalten. När ett sökresultat visar sig och innehåller för många bilder kan man specificera med fler sökord (till exempel ett datumintervall) och söka igen för att förfinasökningen.

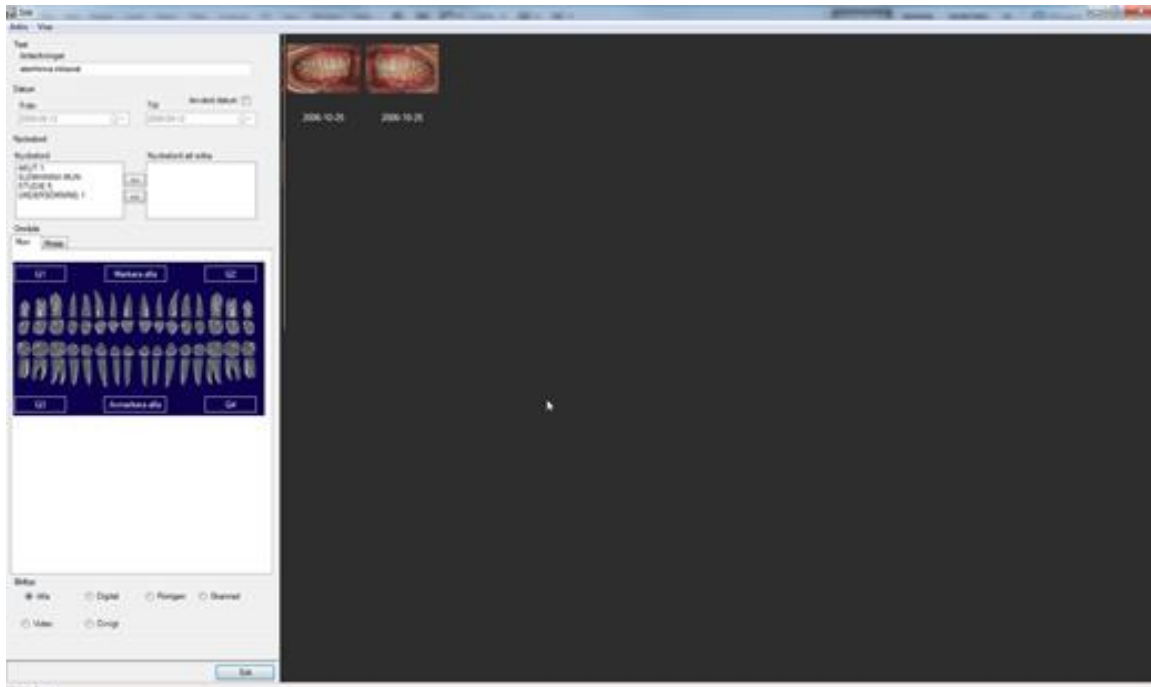

Ovan är en sökning gjord på fritexten "slemhinna intraoral" vilket resulterat i 2 bilder (i spalten till höger).

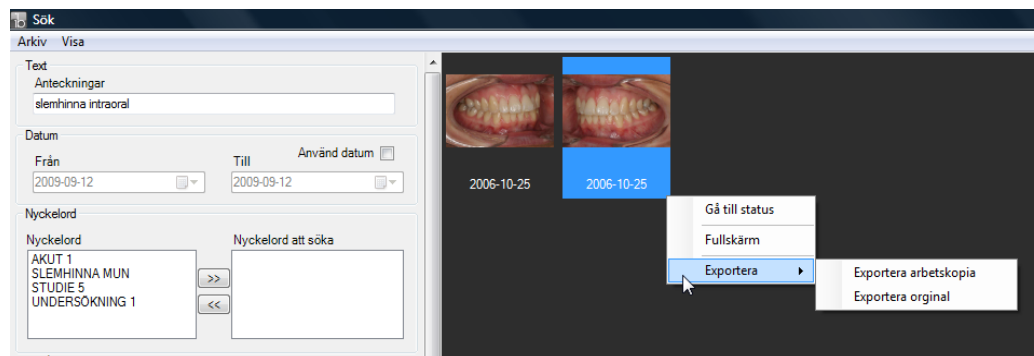

Om man högerklickar på en bild får man fram några alternativ.

Använd Windows standard förfarande (tidigare beskrivet på sid 30) för att markera flera bilder.


"Gå till status" öppnar den patient som bilden hör till (det vill säga den bilden som man högerklickar på).

"Fullskärm" visar alla markerade bilder (det kan vara från flera olika patienter). I bildspelsläget ser man ingen annan klinisk information varför man kan visa bilder oidentifierade t ex vid utbildning.

"Exportera" ger användaren möjlighet att exportera ut de markerade bilderna till extern valfri mapp. Man får då också en fråga om man vill exportera arbetskopiorna eller originalbilderna. Vid export finns all information/bilder kvar i ImageBank.


VISA BILDER OVANPÅ ANDRA PROGRAM

Det går att ställa in ImageBank så att det inte försvinner bakom andra program man jobbar i. Det kan ibland vara fördelaktigt att kunna jobba i sitt administrativa program samtidigt som man kan titta på bilderna i ImageBank.

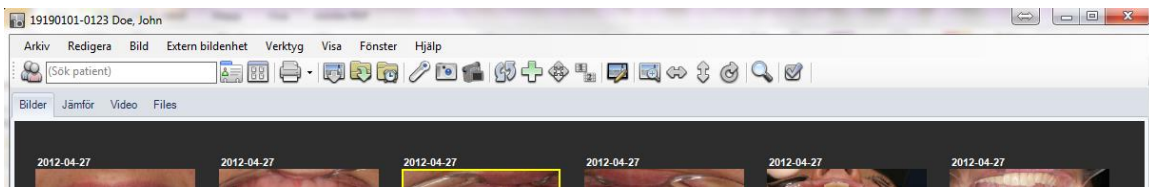

När ImageBank är "Återställd nedåt" (enligt ovan, fyrkanten i högra hörnet till vänster om krysset) kan man själv ställa in ImageBanks storlek genom att dra i hörnen/kanterna. Om man vill återställa ImageBanks fönster klickar man på fyrkanten högst upp i högra hörnet (Maximera). Klicka på samma ställe för att komma tillbaka till den eget inställda storleken (Windows standard).


Med hjälp av "Återställ nedåt" kan man placera ImageBank i förminskat format t ex över det administrativa programmet. Problemet är dock att ImageBank försvinner bakom om man börjar använda det andra programmet. Det finns dock en lösning:

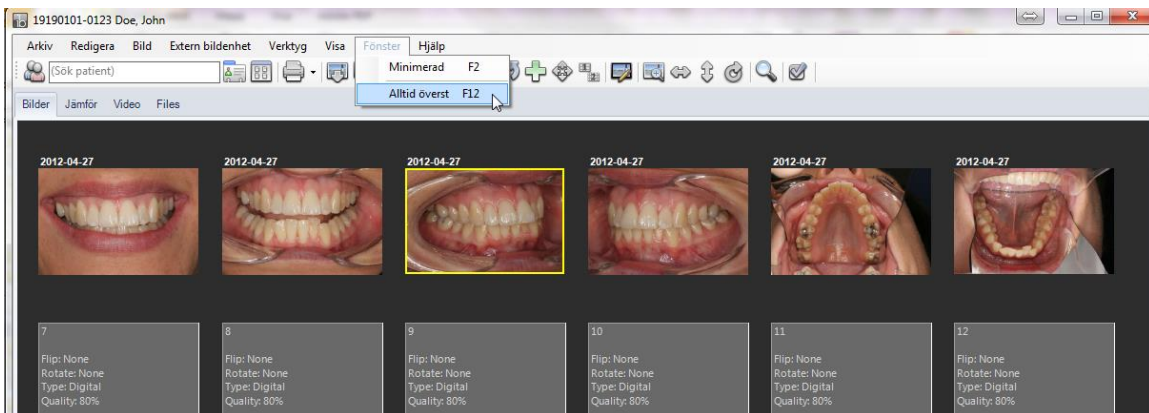

Genom att välja **"Alltid överst"** under **"Fönster"** (alternativt snabb kommando F12 eller ikonen längst till höger) kommer ImageBank att stanna kvar **"ovanpå"** även om man arbetar i sitt administrativa program. Funktionen avaktiveras på samma sätt som man aktiverade den.

Ett annat alternativ är att välja **"Minimerad"** (samma meny: **"Fönster" → "Minimerad" F2**). Då kommer ImageBank automatiskt att förminskas och hamna **"Alltid överst"**. Från detta Minimerade läge kan man högerklicka på bilder och starta bildspel samt andra funktioner

som finns på snabbmenyn. Ta bort funktionen genom att välja bort minimerad t ex med F2. "Minimerad" -vyn tar bort några funktioner som t ex datumflikarna längst ner. Man kan däremot fortfarande högerklicka på bilderna och t ex starta ett bildspel.

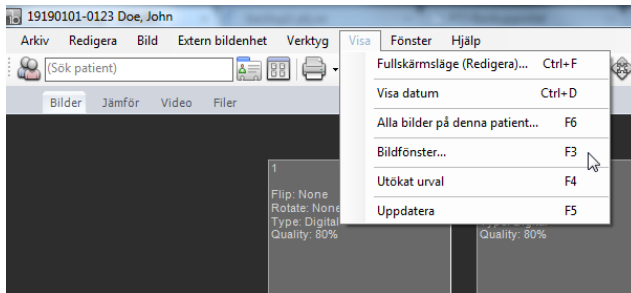


"Visa" innehåller några alternativa vyer:

"Alla bilder på denna patient", "Bildfönster" och "Utökad urval".

"Alla bilder på denna patient" är beskrivet på sid 23.

BILDFÖNSTER

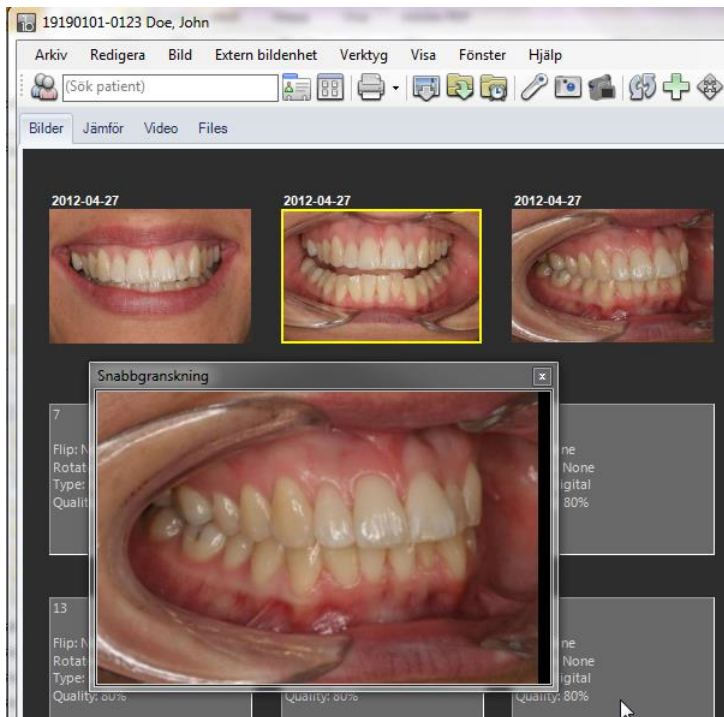


"Bildfönster". Via kortkommandot F3 (eller via menyn "*Visa → Bildfönster...*") kan man öppna ett fönster som kommer att ligga ovanpå alla andra program. Man byter bild enbart genom att föra musen över en bild i ett status i ImageBank. Funktionen kan vara ett enklare sätt att tillfälligt visa en bild samtidigt som man jobbar i sitt administrativa program.

"Snabbgranskning" går att kombinera med Minimerad vy (F2). Då för man bara muspekaren över en av de mindre bilderna i ImageBanks minimerade läge och så ändras bilden momentant i "Snabbgranskning". Alla fönster går att storleksförändra genom att dra i hörnen/kanterna.

Via kortkommandot F6 (eller via knapparna "*Visa → Alla bilder på denna patient*") så öppnas ett fönster med samtliga bilder som finns på patienten. Detta fönster går även att visa "*Alltid överst*". Funktionen är tidigare beskriven på sidan 23 för att flytta bilder mellan patienter.

UTÖKAT URVAL

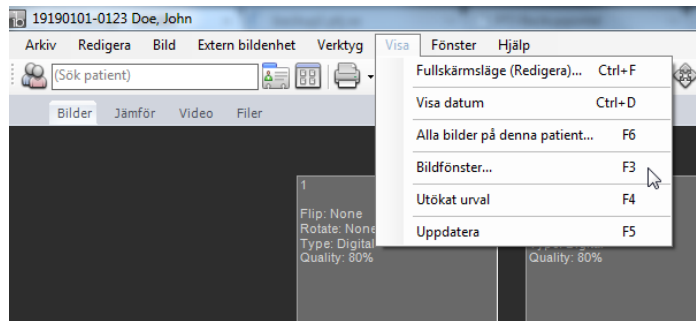

Om man markerar en eller flera bilder och sedan väljer "Utökad urval" (kortkommande F4) läggs bilderna i en tillfällig behållare. Denna behållare kan sedan fyllas på med bilder från andra bildkartor och även andra patienter.

A screenshot of the 'Utökad urval' window. It has buttons for 'Rensa lista', 'Ta bort', 'Visa', and 'Kopiera till status'. Below the buttons is a table with the following data:

Bildnamn	Status	Personnummer	Namn
IMG_3639.JPG	2009-01-30	19620417-5571	Marcus Andersson
IMG_3640.JPG	2009-01-30	19620417-5571	Marcus Andersson
IMG_3641.JPG	2009-01-30	19620417-5571	Marcus Andersson
IMG_3640.JPG	2009-01-30 (6)	19620417-5571	Pålsson Palle
IMG_3639.JPG	2009-01-30 (6)	19620417-5571	Pålsson Palle

Markera de bilder som önskas för att sedan visa eller kopiera över dem till ett specifikt status. Här har man hämtat bilder från två olika patienter.

MALL HANTERAREN


Med hjälp av "Mall hanteraren" kan man förändra de bildkartor (mallar/status) som bilder sparas på. Man kan också skapa egna bildkartor med 1-24 platshållare på. Om man är ovan vid bildhantering rekommenderas de fördefinierade bildkartorna ("12" eller "24"). Om man har mer utarbetade rutiner kan man göra mer individuellt anpassade bildkartor.

För att göra en ny Bildkarta (mall) gör så här:


1. Klicka på "Verktyg → Mall hanteraren...".
2. Klicka på "Arkiv → Ny".
3. Namnge den nya bildkartan och välj antal bildhållare på kartan (1-24st). Klicka [OK]. Bildkartan skapas nu.

- Om man önskar så ställ in storlek på platshållarna (de behöver inte ha samma storlek), placera platshållarna på kartan efter eget tycke och smak. För att ändra storlek så markera en platshållare och dra i något hörn.
- Genom att högerklicka på en platshållare når man de specifika egenskaperna för respektive bild som man kan förutbestämma. Mycket praktiskt vid rutinmässig fotografering till exempel av nya patienter. Läs mer om bilders egenskaper på sid **Error! Bookmark not defined..**
- Man kan styra importeringsordningen, ImageBank importerar bilderna med hjälp av *"Redigera/Sätt importeringsordning"* (mer om detta längre ner på sidan).
- Ta bort eventuella bildkartor genom att markera i vänsterspalten och sedan högerklicka och välj *"Släng"*.


Exempel på skapande av ny bildkarta (mall) nedan:

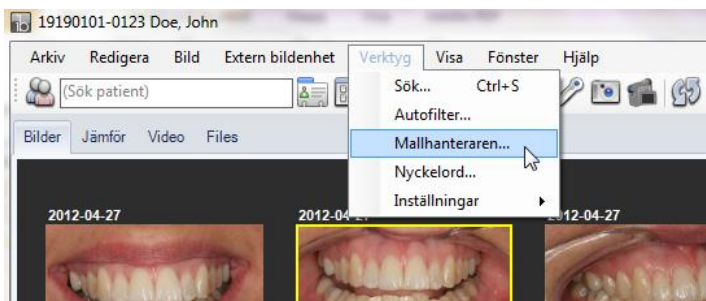

Öppna *"Mall hanteraren"*.

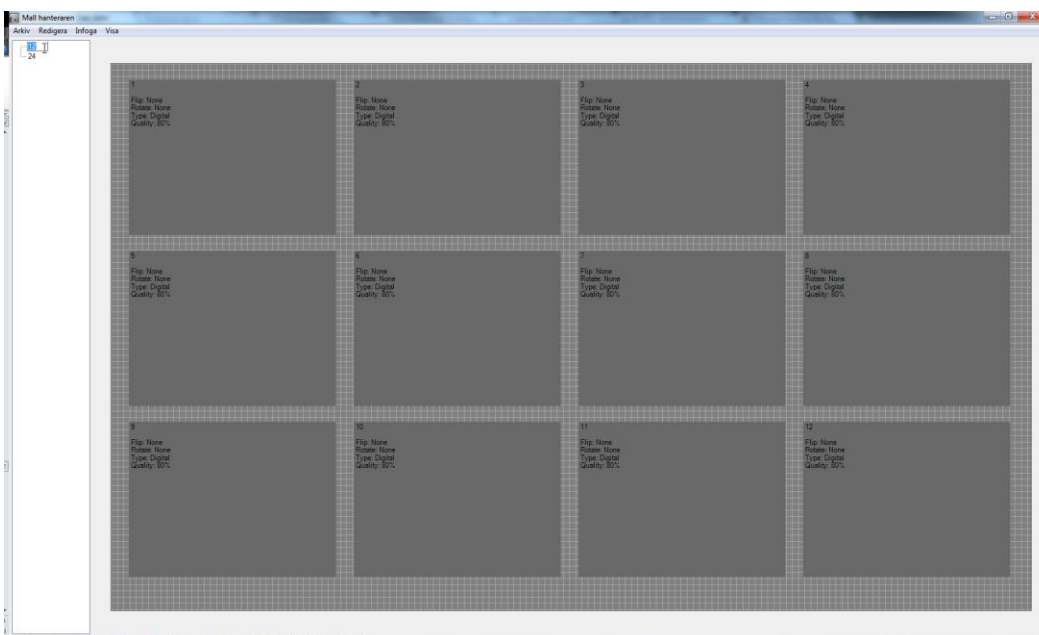

I vänsterspalten ser man de befintliga bildkartor man kan välja. Markera en bildkarta för att göra eventuella förändringar i någon av dem. "12" – bildskartan är här markerad och visas.

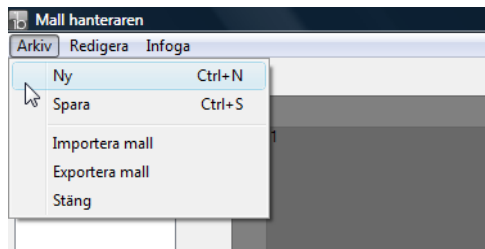


Under "Arkiv → Ny" kan man skapa en ny bildkarta med egna inställningar.

"Spara" sparar den aktiva mallen.


"Importera mall" importerar mall som skapats i andra fristående ImageBank.

"Exportera mall" exporterar mall till andra fristående ImageBank.


"Stäng" stänger mall hanteraren.

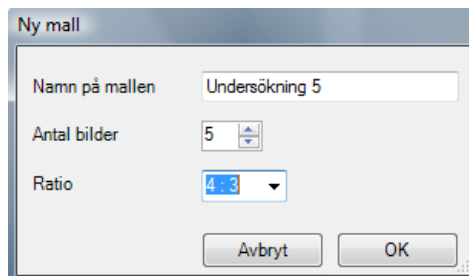


Här har vi valt att ha med 5 bildhållare (det går att välja mellan 1-24 st i rutan "Antal bilder"). Döp bildkartan genom att skriva i "Namn på mallen". Vi döper denna mall till "Undersökning 5". "Ratio" förändrar bildens längd/bredd förhållande vilket normalt inte behöver förändras från förinställt 4:3.

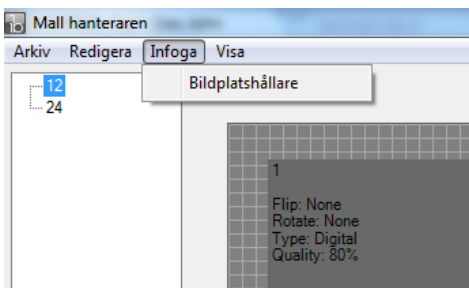

"Infoga/Bildplatshållare" lägger till extra bildplatshållare i ett status.

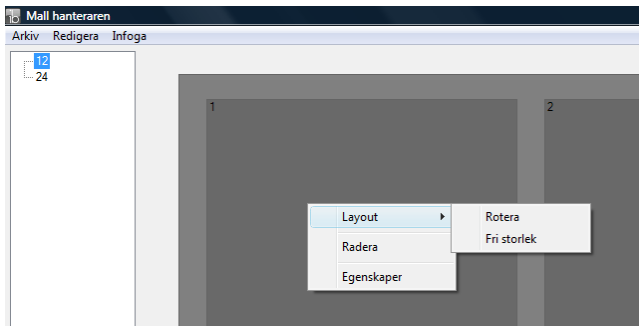

Högerklicka på en platshållare/bild för att ge den fördefinierade "Egenskaper" (valfritt).

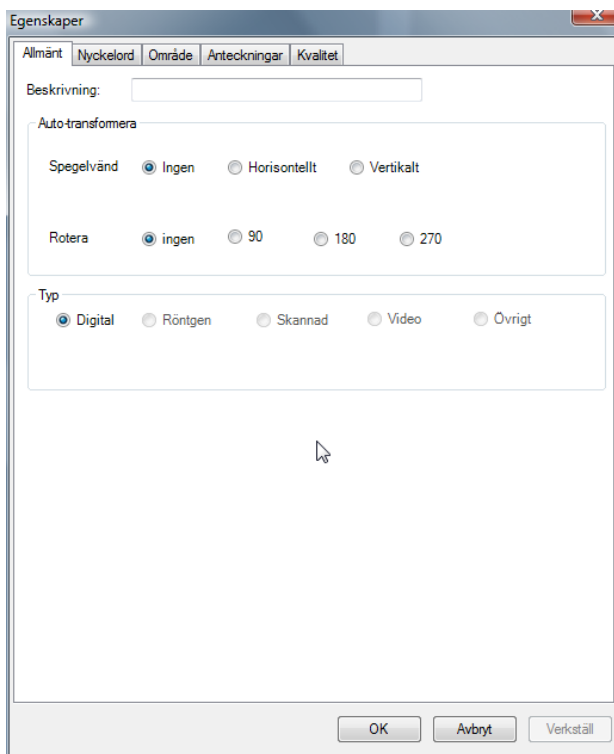


"Egenskaper" - rutan (gäller för markerad bild). Här kan man ställa in vad som ska hända med bilden som importeras till platshållaren. Läs mer om bilders egenskaper på sid **Error! Bookmark not defined.**

Det går till exempel att spegelvända och rotera bilder. Kvaliteten på arbetskopian som lagras ovanpå originalet kan bestämmas här (under fliken "Kvalitet"). Man kan också välja anatomiskt område som är med på bilden samt olika typer av "Nyckelord" och även "Anteckningar" (fritext). Det ställs in under respektive flik "Allmänt", "Nyckelord", "Område", "Anteckningar" och "Kvalitet". Alla "Egenskaper" är frivilliga det vill säga inget krav vid skapande av mallar.

Man kan också göra så att vissa bildkartor har förutbestämda egenskaper medan andra inte har några. De befintliga bildkartorna 12, 24 är utan några egenskaper (bortsett från komprimering under "Kvalitet").


Rekommendationen är att börja med de befintliga enkla 12- och 24-bilds kartorna och sedan eventuellt skapa egna verksamhets-specifika.

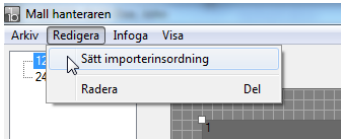

Via "Redigera/Sätt importeringsordning" väljer man i vilken ordning ImageBank ska importera in bilder till den bildkarta man har aktiv. Den ordning man klickar på platshållarna efter att ha klickat på "Sätt importeringsordning" är den ordning ImageBank kommer importera in bilderna i. I bilden ovan ser man en 1:a i vänstra hörnet på den grå platshållaren. Det är där den första bilden kommer att hamna. Med hjälp av denna funktion kan man styra sina rutinmässigt tagna serier på ett effektivt sätt. Man behöver dock inte börja med detta mer avancerade tänk utan använd gärna den befintliga bildkartan 12 eller 24 inledningsvis.


INSTÄLLNINGAR

INSTÄLLNINGAR, DENNA DATOR

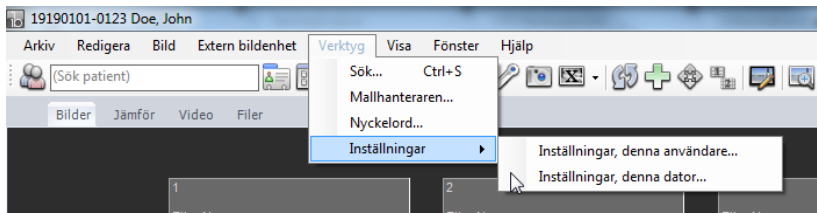

Öppna "Inställningar, denna dator..." via "Verktyg".

IMPORTINSTÄLLNINGAR

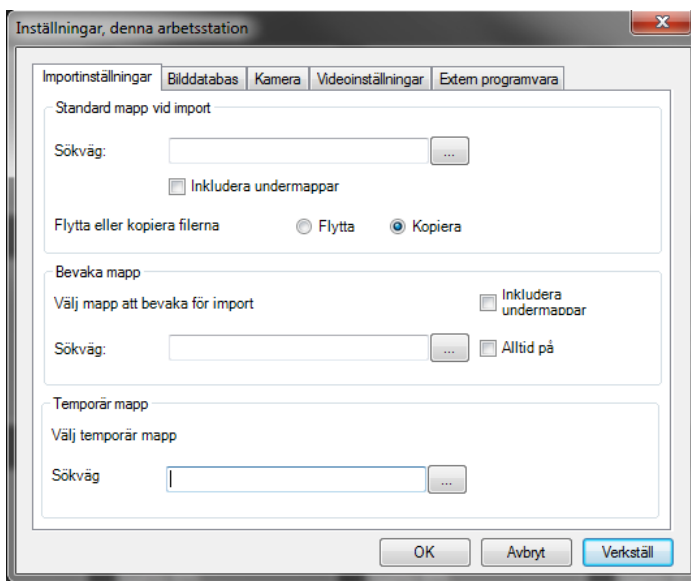


“Standard mapp vid import” ställer in sökvägen (mapp till exempel på ett kamerakort) där bilder hämtas automatiskt vid *“Import allt”* (mer information om import på sid 9).
”Inkludera undermappar” tömmer även alla undermappar.
”Flytta eller kopiera filerna...” tar bort eller behåller filerna i ursprungsmappen (vanligast är att ”Flytta”)

"Bevaka mapp". Ställer in sökvägen där bilder hämtas helt automatiskt så fort det finns någon bild (till exempel en via uppkopplad kamera vid exponering eller om du exporterar en bild från ett annat program). Det går även här att välja *"inkludera undermappar"*. Du kan också välja *"Alltid på"*, dvs du behöver inte klicka på knappen bevaka mapp, utan ImageBank kommer alltid att kontrollera om det finns några nya bilder att hämta i den valda mappen.

"Temporär mapp". Ställer in sökväg till den temporära mapp som ibland används. Om man inte ställer in sökvägen så använder ImageBank Windows standardmappar. Man behöver således inte ställa in mappen om man inte önskar styra var systemet belastas.

"Verkställ" eller **"Ok"** för att spara inställningar.


BILDDATABAS

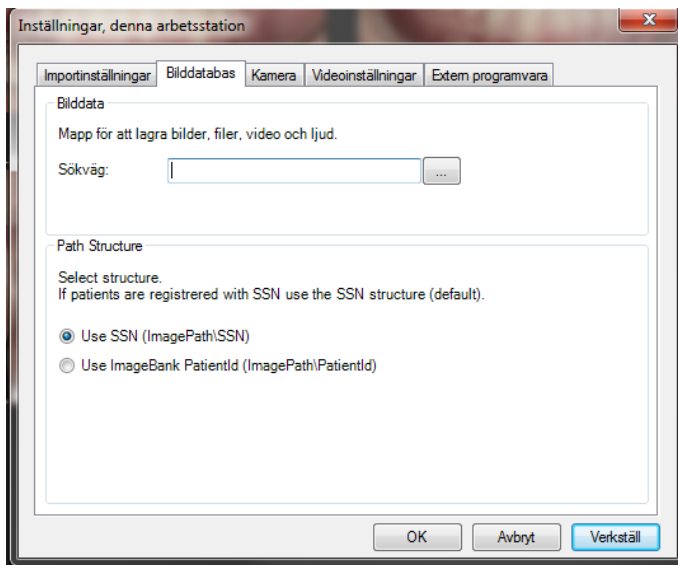

"Bilddata". Ställ in sökväg till mappen där bilder, filer, video och ljud lagras. Är oftast en gemensam mapp för alla datorer i nätverket, exempelvis servern.


"Mapp Struktur". Ska enligt standard vara SSN, för de länder som inte har person nr som ett obligatorisk data i journalen kan man ställa in patientid som mappstruktur.

KAMERA

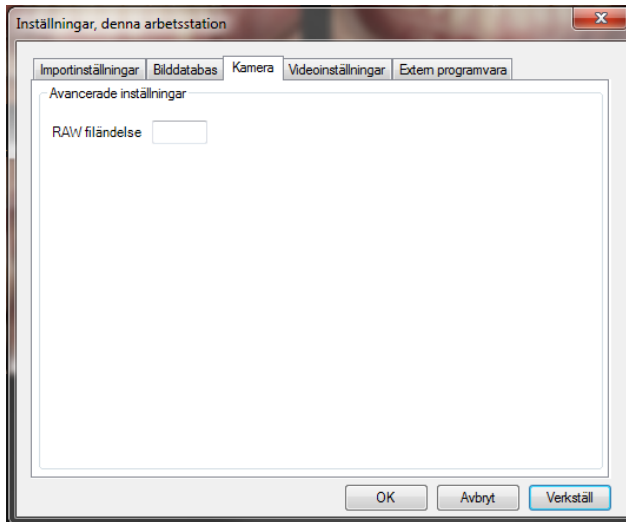


"Kamera/Avancerad inställningar". I de fall man vill spara så kallade RAW-bilder (den digitala kamerans råformat) skrivet man in önskvärd filändelse här till exempel .RAW.

VIDEO

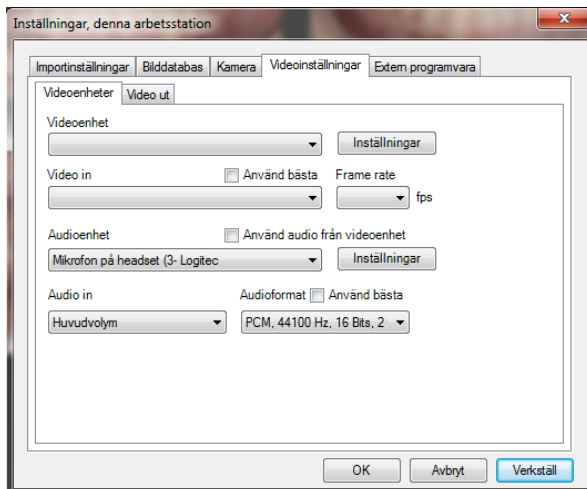


Inställningar för video med ljud, in och ut samt möjligheter till att komprimera video med ljud för att minska storleken på videofilerna. ImageBank klarar av de flesta "codec/format" som finns installerade på datorn.

EXTERNA PROGRAM

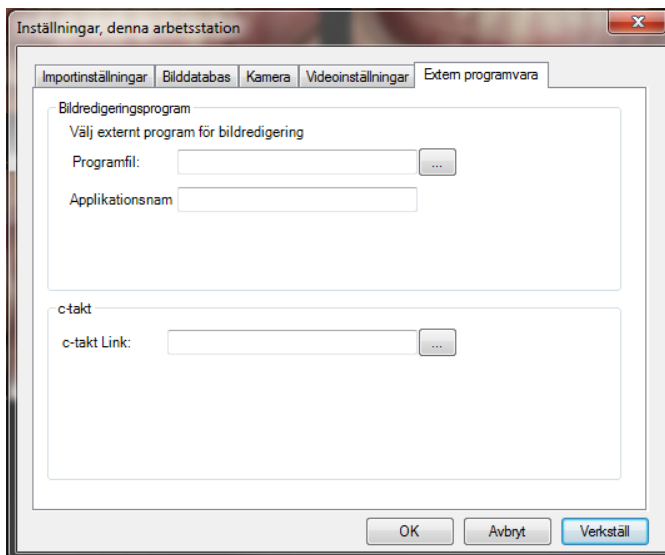

"Bildredigeringsprogram". Länkar till den fil som startar det eventuella externa bildprogram som man vill kunna redigera bilder i till exempel Photoshop. Bearbetad bild sparas i ImageBank.

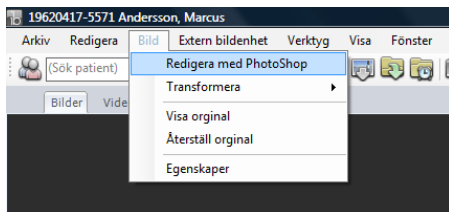

När det finns ett program länkat enligt ovan exporterar man via "*Bild/Redigera med XX*". Denna funktion finns således bara om det finns ett program länkat.

"C-takt Link". Sökväg för att starta externt program för krypterad överföring av bilder och filer. Det finns även under "*Verktyg → Inställningar → ...denna användare*" möjlighet att länka till ImageBanks egna webbaserade e-postklient MedSpace.

VANLIGA KORTKOMMANDON

- Nytt Status Ctrl+Shift+N
- Importera allt Ctrl+Shift+I
- Importera från disk CTRL+I
- Markera alla Ctrl+A
- Kortkommando över bild Högerklicka
- Markera, flera Ctrl+Click
- Minimera fönstret (inkl "on top") F2
- Bildfönster (aktiv bild "on top") F3
- Utökat val (extra bildbehållare) F4
- Visa alla bilder på aktiv patient F6
- Alltid överst F12
- Byt mellan datumflikar Höger/Vänsterpil
- Uppdatera ImageBank (om bilder saknas) F5
- Skriv ut markerad bild Ctrl+P
- Skriv ut allt (ett helt status) Ctrl+Skift+P
- Skriv ut Status (Skriver ut statuset enligt mallen) Ctrl+Alt+P

I BILDSPEL (SLIDE SHOW):

- Fullskärmsläge (bildspel och redigera) Ctrl+F
- Återgå från Fullskärmsläge Esc
- Avancera bild framåt/bakåt Höger/Vänsterpil
- De flesta funktioner i ImageBank har kortkommandon. Dessa står vanligtvis bredvid respektive kommando i verktygsmenyerna eller som en popup text vid ikoner.

ÖVERSIKT MENYER


ARKIV

"Ny Patient". Möjlighet att registrera ny patient. Uppgifter kommer vanligtvis från annan applikation till exempel ett journalprogram. Funktionen anpassas till enhetens kravspecifikation.

"Visa patient Uppgifter" Här kan du se patientens uppgifter samt göra ändringar.

"Stäng patient". "Loggar ut" patienten så att man inte kan se några patientdata på skärmen (patientdatalagen).

"Nytt status". Öppnar en ny bildkarta (kallas också status eller mall). Användaren får valmöjlighet att välja typ.

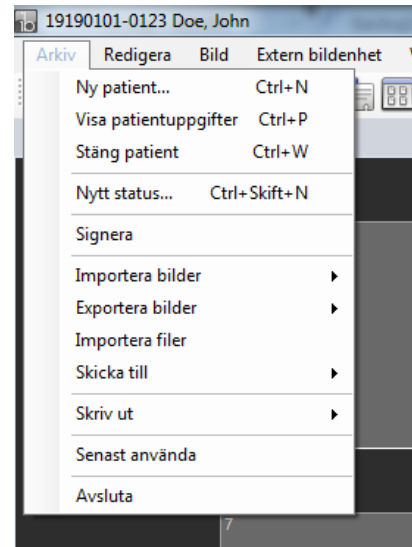

"Signera". Användarspecifikt och anpassas efter kravspecifikation från enheten. Krav för att följa patientdatalagen.

"Importera bilder". Imagebank har flera olika varianter på import av bilder. Vanligast är *"Importera allt"* (fördefinierad sökväg) och *"Importera från disk"*.

"Exportera bilder". *"Exportera arbetskopior"* exporterar den komprimerade kopian med alla redigeringar som eventuellt är utförda på bilden. *"Exportera original"* exporterar filen som den såg ut vid import till ImageBank och utan eventuell redigering från ImageBank. Originalen är vanligtvis en större fil.

ImageBank sparar alltid originalbilden vilka förändringar man än gjort med bilden (patientdatalagen). Det vanliga är att man vill exportera sin kopia som ofta är mindre och kanske redigerad, t ex spegelvänd eller roterad.

"Importera Filer". Importerar dokument/texter som relaterar till patienten.


"Skicka till" anpassas efter kravspecifikationen. Teamet bakom ImageBank har tagit fram en SSL-krypterad webbaserad e-post klient för att kunna skicka material (bild, text, filer, video och ljud). Denna och andra nås bland annat från denna funktion.

"Skriv ut". Skriver ut enstaka bilder eller hela status. Med eller utan datum och personuppgifter, annoteringar mm. Det finns även en funktion för utskrifter enligt personuppgiftslagen (PUL).

"Senast använda". Listar de senast aktiva patienterna för snabb access.

"Avsluta". Stänger ImageBank.

REDIGERA

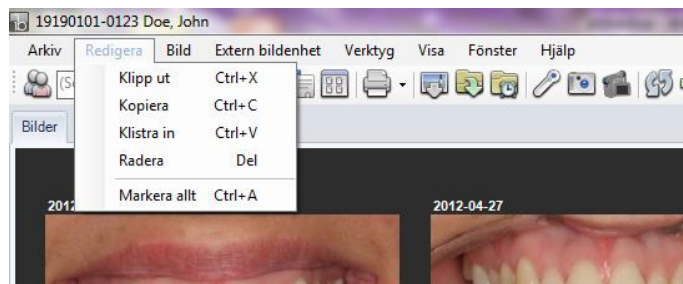


"Klipp ut". Klipper ut t ex en bild i ett status för att senare kunna **"Klistras in"**

"Kopiera". Kopierar en bild för att senare kunna **"Klistras in"**. Bilden finns då på två ställen.

"Radera". Slänger, till exempel en bild. En fråga måste vanligtvis besvaras.

"Markera allt". Markerar till exempel alla bilder på en bildkarta.

BILD

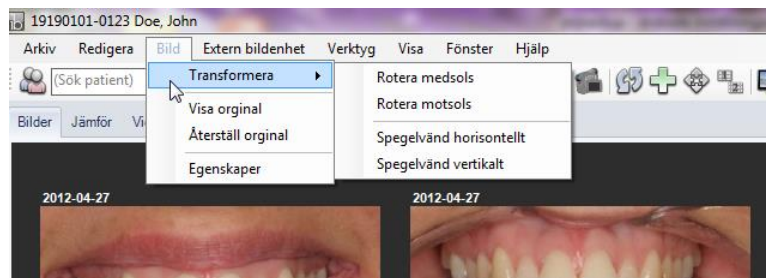


"Transformera". Markera en eller flera bilder som sedan kan roteras och/eller spegelvändas utan att behöva gå in i redigeringsläget. Medför en mycket snabb och enkel redigering av bilder.

"Visa original" och **"Återställ original"**. ImageBank sparar alltid ett original av bilden (patientdatalagen). *"Visa original"* lägger upp originalet, utan justeringar utförda i ImageBank för granskning, justeringarna finns dock kvar. *"Återställ original"* tar däremot bort alla justeringar och återställer bilden.

"Egenskaper". Visar alla bildens egenskaper. En mycket kraftfull funktion för att kunna indexera och söka globalt på stora material.

EXTERN BILDENHET

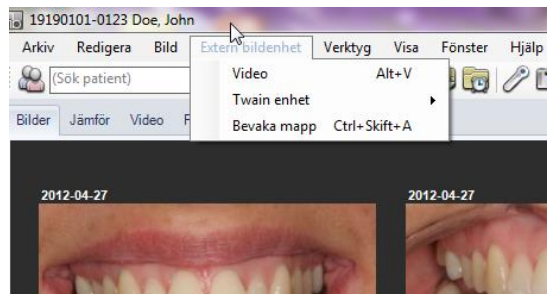


"Video". Öppnar Videovyn.

"Twain enhet". Visar vilka TWAIN kompatibla enheter som finns installerade på datorn. Välj installerad enhet för att till exempel scanna in dokument till ImageBank.

"Bevaka mapp". Importfunktion som bevakar en av användaren definierad mapp. Mappen kan vara en kamera som töms automatiskt när det finns bilder.

VERKTYG

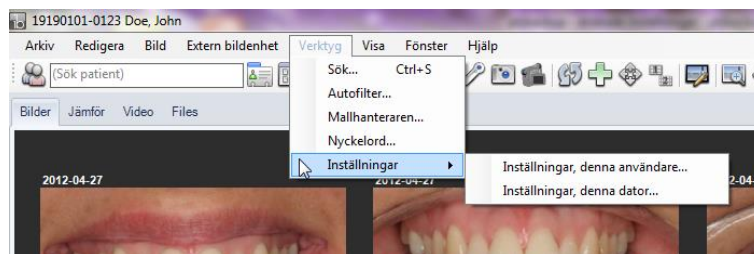


"Sök...". Öppnar den mycket effektiva men intuitiva sökmotorn i ImageBank.

"Mall hanteraren...". Användaren kan här bygga nya mallar (bildkartor/status).

"Nyckelord...". Användaren kan här skapa nyckelord för mer strukturerad indexering av material.

"Inställningar". Mer information på sid 55.

VISA

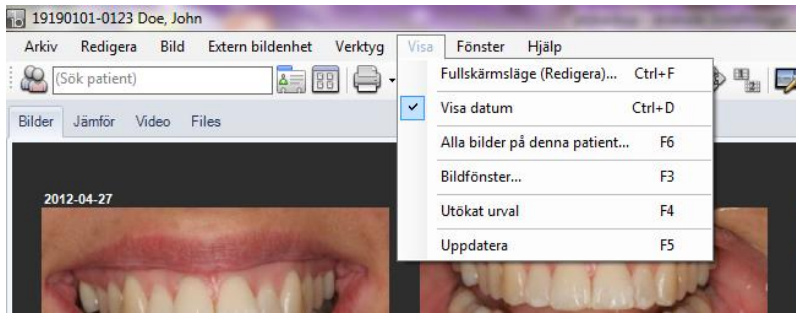

"Fullskärmsläge (Redigera)...". Växlar vy till bildspelsläget samt redigeringsläget (båda är i samma vilket förenklar avsevärt).

"Visa datum". Datum visas eller visas inte på bilderna i huvudvyn.


"Alla bilder på en patient...". Öppnar ett separat fönster med samtliga bilder som finns på en patient (det kan således vara många bildkartor på en och samma patient). Fönstret ger en bättre översikt och gör det enklare att hantera bilder (skriva ut, visa, exportera, redigera mm).

"Bildfönster". Öppnar ett litet fönster med bara en bild i. Bilden växlar beroende på vilken bild som musen senast "hovrade" över på bildmallen. Ger användaren en möjligt att använda ett fönster som ligger "ovanpå" alla andra program till exempel om inte journalprogrammet kan ta emot bilder från ImageBank så är fönstret en hjälp vid journalskrivning.

"Utökad val". Ger användaren en "behållare" där man tillfälligt kan samla bilder även från olika patienter. Ger en bättre översikt och större möjligheter till exempel vid utbildning och föreläsningar att samla material.

"Uppdatera". Uppdaterar fönster, bilder mm om många processer eller användare jobbar simultant. Sker vanligtvis automatiskt men kan aktiveras här.

FÖNSTER

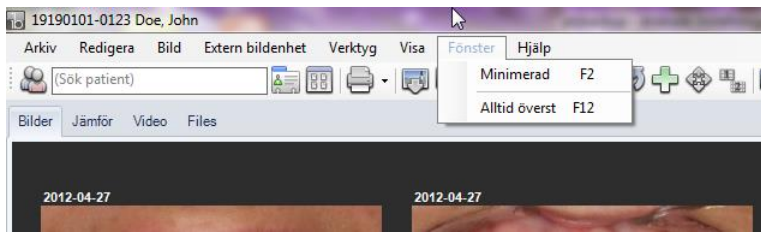


"Minimerad". Minskar ner hela ImageBanks storlek (valfri storlek) och lägger det "ovanpå" alla andra program. Ofta bra i kombination med "Bildfönster" (enligt förra meny). Gör att man kan placera hela ImageBank bredvid till exempel journalprogram utan att det försvinner "under" när man använder journalprogrammet. För att återställa Imagebank trycker du på "F2"

"Alltid överst". Gör att ImageBank alltid är "ovanpå" alla andra program. Specialfunktion till specifika enheter.

HJÄLP


"Onlinehjälp". För varje verksamhet (beroende på kravspecifikation) anpassad Online hjälp med interaktivt material, filmer mm.

"Om ImageBank". Produkt/versions information. Licensid och nummer.

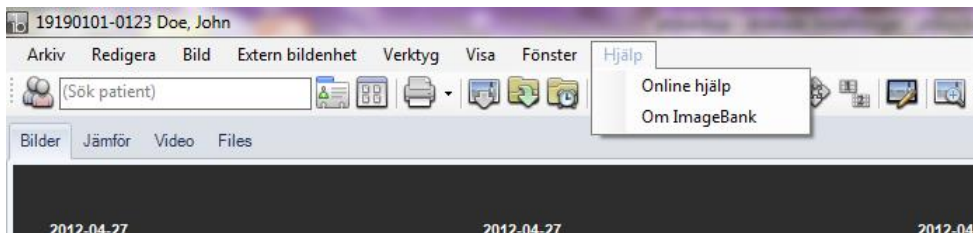

VERKTYGSRAD

Verktögsraden finns överst i huvudvyn. För man musen över ikonerna så får man en tooltip som beskriver funktionen. Följande funktioner finns tillgängliga på verktögsraden:

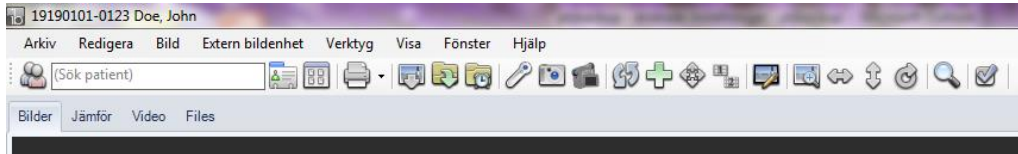

"Sök patient". Klicka i rutan och tryck "Retur" så listas alla patienter. Skriv ett namn (verksamhetsspecifik anpassning beroende på enhetens kravspecifikation) till exempel början på efternamnet och så listas träffarna. Markera en patient och den blir aktiv. Vanligtvis aktiveras patienter inte via denna funktion utan från annan applikation (journalprogram). Klicka på "person"-ikonerna för att fälla ut/fälla in sökfältet.




"Visa patientuppgifter". Namn, personnummer mm beroende på respektive enhets önskemål och kopplingar till andra program till exempel journalprogram. I denna meny är det möjligt att ändra personens personnummer.



"Nytt status". Öppnar en ny bildkarta (kallas också status eller mall). Användaren får valmöjlighet att välja typ.



"Skriv ut". Skriver ut enskilda bilder eller hela status. Med eller utan datum och personuppgifter, annoteringar mm. Det finns även en funktion för utskrifter enligt personuppgiftslagen (PUL).

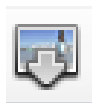

"Importerera från disk". Imagebank har flera olika varianter på import av bilder. Vanligast är "Importerera allt" (fördefinierad sökväg) och "Importerera från disk". "Importerera från disk" öppnar Windows utforskaren och låter användaren leta upp en eller flera bilder som sedan importeras på en gång.



"Importera allt". Importerar från fördefinierad sökväg. Kan även ställas in så den tömmer sökvägen. Det kan till exempel vara ett kamerakort som töms automatiskt och är redo att användas direkt i kameran efter importen.



"Bevaka mapp". Importfunktion som bevakar en av användaren definierad mapp. Mappen kan vara en kamera som töms automatiskt när det finns bilder.



"Starta IO kamera". Öppnar bildtagningsfönster för interorkamera.



"Anslut Digital kamera". Ansluter kamera för att ta bilder direkt i status. Uppdaterar även anslutning om den brutits mellan kamera och dator.



"Starta Video inspelning". Startar video inspelning och söker om en video enhet är kopplad till datorn.



"Uppdatera". Uppdaterar fönster, bilder mm om många processer eller användare jobbar simultant. Sker vanligtvis automatiskt men kan aktiveras här.



"Markera allt". Markerar till exempel alla bilder på en bildkarta.



"Drag släpp PÅ/AV". Klicka för att kunna flytta bilder med hjälp av "drag and drop" på en bildkarta. Klicka igen för att stänga möjligheten. Det får inte vara för lätt att av misstag flytta bilder. Funktionen säkrar processen. **OBS!** När "drag and drop" funktionen är aktiverad går det **ej** att dubbelklicka på en bild för att öppna redigeringsläge/fullskärmsläge, detta för att undvika att råka dubbelklicka på en bild man vill flytta.



"Fullskärmsläge (Redigera)...". Växlar vy till bildspelsläget samt redigeringsläget (båda är i samma vilket förenklar avsevärt).



"Förstoringsglas". Genom att hålla ner vänster musknapp på bilden kommer du att se en förstorad bild av det markerade området liksom funktionen i redigerar läge/fullskärms läge.



"Spegelvänd horisontellt". Markera en eller flera bilder i ett status och klicka så justeras samtliga bilder momentant. Medför en mycket snabb och enkel redigering av bilder.



"Spegelvänd vertikalt". Som ovan fast vertikalt.



"Roterar medsols". Som ovan fast rotering av bild/er 90 grader medsols.




"Sök". Öppnar den mycket effektiva men intuitiva sökmotorn i ImageBank.



"Alltid överst". Gör att ImageBank alltid är "ovanpå" alla andra program. Specialfunktion till specifika enheter.

FLIKAR

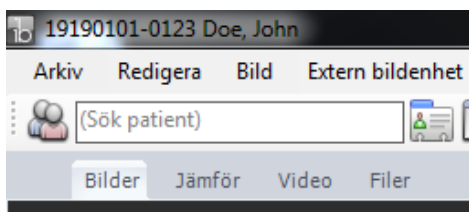

"Bilder". Huvudvyn med bildkartor. Om det finns flera bildkartor på samma patient växlar man snabbt mellan dem via flikar i underkant på programmet.

"Jämför". Öppnar ett fönster för att jämföra bilder mellan dom olika markerade statusen/bildkartorna


"Video". Spelar in och lagrar videosekvenser.

"Filer". Filer lagras här. Import och export av filerna utgår från samma flik.



"Datumflikar". Varje ny bildkarta medför en ny datum flik. Man kan justera datum och lägga till text (gul) som kort information om fliken (högerklicka över respektive flik för mer alternativ). Man växlar mellan status med piltangenterna på tangentbordet eller genom att klicka på respektive flik.

HJÄLP MENYER/GENVÄGAR

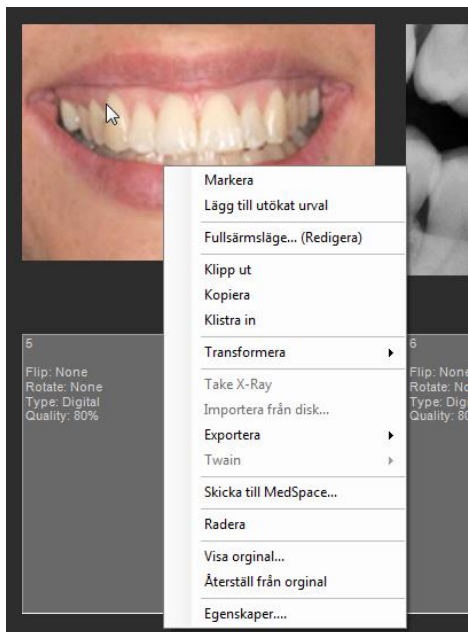

Vid högerklick över en bild når man vanliga kommandon.

"Markera". Markerar bilden (gul ram). Det går att markera fler bilder på samma sätt.

"Lägg till utökat urval". Placerar bilden i "Utökat urval". Ger användaren en "behållare" där man tillfälligt kan samla bilder även från olika patienter. Ger en bättre översikt och större möjligheter till exempel vid utbildning och föreläsningar att samla material.

"Fullskärmsläge... (Redigera)". Växlar vy till bildspelsläget samt redigeringsläget (båda är i samma vilket förenklar avsevärt).

"Klipp ut", "Kopiera", "Klistra in" gör precis vad som beskrivs med markerad bild.

"Transformera". Markera en eller flera bilder som sedan kan roteras och/eller spegelvändas utan att behöva gå in i redigeringsläget. Medför en mycket snabb och enkel redigering av bilder.

"Take X-Ray(Ta röntgenbild)". Går endast att välja om du högerklickar på en ruta som inte innehåller någon bild. Förbereder ImageBank för att importera en röntgenbild och söker efter eventuell röntgenmaskin som är kopplad till datorn.

"Importera från disk". Imagebank har flera olika varianter på import av bilder. Vanligast är *"Importera allt"* (fördefinierad sökväg) och *"Importera från disk"*. *"Importera från disk"* importerar via Windows utforskaren (användaren väljer själv bild/bilder som sedan importeras i ett svep). Markera tom bildhållare så fungerar länken.

"Exportera" och **"Exportera arbetskopior"** exporterar den komprimerade kopian med alla redigeringar som eventuellt är utförda på bilden. *"Exportera original"* exporterar filen som den såg ut vid import till ImageBank och utan eventuell redigering från ImageBank. Originalen är vanligtvis en större fil.

ImageBank sparar alltid originalbilden vilka förändringar man än gjort med bilden (patientdatalagen). Det vanliga är att man vill exportera sin kopia som ofta är mindre och kanske redigerad, t ex spegelvänd eller roterad.

"Twain". Låter användaren välja mellan till datorn installerade och anslutna Twain-kompatibla enheter, till exempel en scanner som då kan scanna in bilder direkt till bildhållaren.

"Skicka till MedSpace...". Teamet bakom ImageBank har tagit fram en SSL-krypterad webbaserad e-post klient för att kunna skicka material (bild, text, filer, video och ljud). Denna och andra nås bland annat från denna funktion.

"Radera". Slänger, till exempel en bild. En fråga måste vanligtvis besvaras.

"Visa original" och **"Återställ original"**. ImageBank sparar alltid ett original av bilden (patientdatalagen). *"Visa original"* lägger upp originalet, utan justeringar utförda i ImageBank för granskning, justeringarna finns dock kvar. *"Återställ original"* tar däremot bort alla justeringar och återställer bilden.

"Egenskaper". Visar alla bildens egenskaper. En mycket kraftfull funktion för att kunna indexera och söka globalt på stora material.